

**8** Wenn kein Schock empfohlen wird oder nach Schockabgabe „Mit Wiederbelebung beginnen“

Während der Herzdruckmassage bietet der ZOLL AED 3 die Funktion Real CPR Help®, die die Qualität der Herzdruckmassage prüft.



**1** AED einschalten



**2** „Bewusstsein prüfen“





**7** Wenn Schock empfohlen wird, „Blinkende Schocktaste drücken“



**3** „Notruf veranlassen“




**6** „Patient nicht berühren. Analyse läuft.“

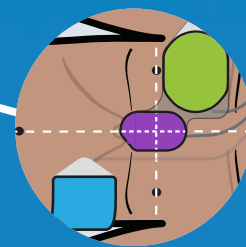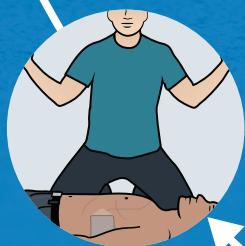

**5** „Defi-elektroden auf entblöbte Patientenbrust kleben“

**4** „Bei Kind Kindertaste drücken“

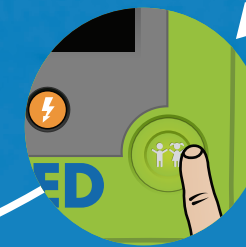

Weitere Informationen zum ZOLL AED 3, erhalten Sie auf [aed.ch](http://aed.ch) oder telefonisch unter +41 52 368 60 00

# ZOLL®