


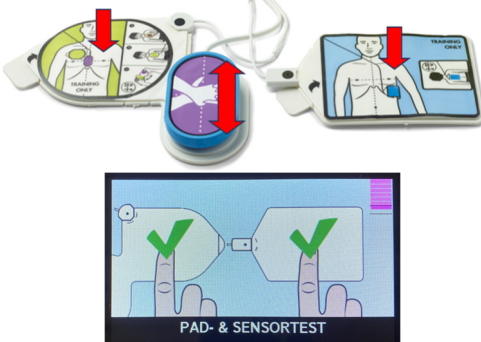
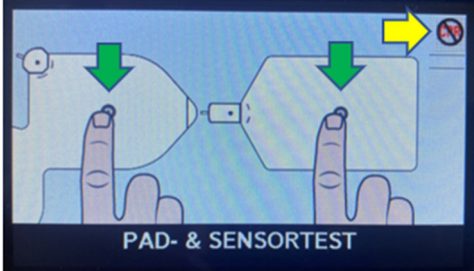


# ZOLL AED 3 Trainer - Einstellungen und Selbsttestfunktionen

## Einstellungen

	<p><b>1. Elektroden- &amp; CPR-Feedback Selbsttest</b></p> <p>Durch ein längeres Betätigen der Einschalttaste gelangt man in das Selbsttestmenü. Die Taste kann losgelassen werden, wenn die Schocktaste ein audiovisuelles Signal von sich gibt.</p>
	<p><b>2. Elektroden &amp; Sensorentest</b></p> <p><b>Elektroden:</b> Bei den CPR-Trainingselektroden hat es zwei Auskerbungen (rot markiert) Diese müssen gedrückt werden, bis der grüne Hacken kurz erscheint.</p> <p><b>CPR-Feedback:</b> Der Sensor wird in waagrechter Position durch Heben und Senken bewegt, bis auf dem AED-Trainerdisplay der violette Balken erscheint. Wenn beide Szenarien eingetroffen sind, hat der ZOLL AED 3 Trainer den Selbsttest erfolgreich bestanden und der AED kann wieder ausgeschaltet werden</p>
	<p><b>3. Mögliche Störungen</b></p> <p>Wenn die Elektroden nach dem Betätigen der Sensoren keinen grünen Hacken aufweisen, müssen diese gewechselt werden.</p> <p>Wenn ein durchgestrichenes CPR-Zeichen erscheint (gelb markiert) müssen die Batterien gewechselt werden. Falls dies nichts hilft, muss der technische Dienst der Procamed AG (052 368 60 00) kontaktiert werden.</p>
	<p><b>4. SETUP-Menü</b></p> <p>Durch ein kurzes Antippen der Menütaste (rot markiert) gelangen Sie in das SETUP-Menü</p>
	<p><b>5. SETUP-Menü</b></p> <p>Hier finden Sie sieben verschiedene Kategorien. Durch die Auswahlstaste (gelb markiert) können Sie die gewünschte Kategorie anwählen.</p> <p>Mit der Bestätigungstaste (grün markiert) können Sie die Funktion ändern</p> <p><b>Wenn Sie das SETUP-Menü verlassen wollen, drücken Sie erneut die Menütaste.</b></p>

# Le formateur AED 3 de ZOLL - Réglages et fonctions d'autotest

## Réglages

	<p><b>1. Feedback des électrodes &amp; de la RCP Autotest</b></p> <p>En appuyant longuement sur le bouton de mise en marche, on accède au menu d'autotest. Le bouton peut être relâché lorsque le bouton de choc émet un signal audiovisuel.</p>
	<p><b>2. Électrodes &amp; test des capteurs</b></p> <p><b>Les électrodes :</b> Sur les électrodes d'entraînement à la RCP, il y a deux encoches (marquées en rouge) qui doivent être enfoncées jusqu'à ce que le crochet vert apparaisse brièvement.</p> <p><b>Retour d'information sur la RCP :</b> Le capteur doit être déplacé en position horizontale en le soulevant et en l'abaissant jusqu'à ce que la barre violette apparaisse sur l'écran du DAE d'entraînement.</p> <p>Si les deux scénarios se sont produits, le ZOLL AED 3 Trainer a réussi l'autotest et le DAE peut être éteint.</p>
	<p><b>3. Pannes possibles</b></p> <p>Si les électrodes ne présentent pas de crochet vert après l'actionnement des capteurs, elles doivent être remplacées.</p> <p>Si un signe RCP barré apparaît (marqué en jaune), les piles doivent être changées.</p> <p>Si cela ne résout pas le problème, il faut contacter le service technique de Procamed AG (052 368 60 00).</p>
	<p><b>4. Menu SETUP</b></p> <p>En appuyant brièvement sur la touche de menu (marquée en rouge), vous accédez au menu SETUP.</p>
	<p><b>5. Menu SETUP</b></p> <p>Vous trouverez ici sept catégories différentes. En appuyant sur la touche de sélection (marquée en jaune), vous pouvez choisir la catégorie souhaitée.</p> <p>Avec la touche de confirmation (marquée en vert), vous pouvez modifier la fonction.</p> <p><b>Si vous souhaitez quitter le menu SETUP, appuyez à nouveau sur la touche de menu.</b></p>