

Montageanleitung Alarmmodul

CompactCase

Montage Alarmmodul



1. Das Alarmmodul besteht aus dem eigentlichen Alarm sowie einem Magneten. Beide Teile sind mit einem Klebestreifen versehen für die Montage.

Batterieinformationen

Batterietyp: AG13

Anzahl: 3 Stk.

Laufzeit: ca. 2 Jahre



2. Schutzfolie vom Klebeband auf der Rückseite des Alarms entfernen. Alarm in der oberen rechten Ecke des Schrankes mit dem EIN-/AUS-Schalter nach rechts (siehe Foto) platzieren. Sicherstellen, dass der Alarm möglichst links am Rahmenrand zu liegen kommt, damit genügend Platz für die Bedienung des Schalters vorhanden ist.

Anschliessend den Alarm für 10 Sekunden gegen den Schrank drücken für optimale Haftung.



3. Der Abstand zwischen Alarm und Magnet darf nicht mehr als 10 mm betragen. Den Magneten so nah wie möglich am Alarm montieren und 10 Sekunden gedrückt halten für optimale Haftung.



4. Das Alarmmodul auf «EIN» schalten, um den Alarm zu testen. Anschliessend die Türe schliessen, so dass sich der Alarm automatisch ausschaltet.