

# Alarmmodul / Module d'alarme

## Montageanleitung / Instructions de montage

### Montageanleitung Alarmmodul

Das Alarmmodul besteht aus dem eigentlichen Alarm sowie einem Magneten. Beide Teile sind mit einem Klebestreifen versehen für die Montage.

**WICHTIG: METALL VOR DEM KLEBEN REINIGEN!**

Batterieinformationen

Batterietyp:	AG13
Anzahl:	3 Stk.
Laufzeit	ca. 2 Jahre

1



Schutzfolie vom Klebeband auf der Rückseite des Alarms entfernen. Alarm in der oberen rechten Ecke des Schanks mit dem EIN-/AUS-Schalter nach rechts (siehe Foto) platzieren. Sicherstellen, dass der Alarm möglichst links am Rahmenrand zu liegen kommt, damit genügend Platz für die Bedienung des Schalters vorhanden ist.

Anschliessend den Alarm für 10 Sekunden gegen den Schrank drücken für optimale Haftung.

2



Der Abstand zwischen Alarm und Magnet darf nicht mehr als 10 mm betragen. Den Magneten so nah wie möglich am Alarm montieren und 10 Sekunden gedrückt halten für optimale Haftung.

3



Das Alarmmodul auf «EIN» schalten, um den Alarm zu testen. Anschliessend die Türe schliessen, so dass sich der Alarm automatisch ausschaltet.

4



# Alarmmodul / Module d'alarme

## Montageanleitung / Instructions de montage

### Instructions de montage du module d'alarme

Le module d'alarme se compose de l'alarme proprement dite et d'un aimant. Les deux parties sont munies d'une bande adhésive pour le montage.

**IMPORTANT : NETTOYER LE MÉTAL AVANT DE LE COLLER !**

Informations sur les piles

Type de pile : AG13

Nombre : 3 pcs.

Durée de fonctionnement : env. 2 ans

1



Retirer la feuille de protection du ruban adhésif au dos de l'alarme. Placer l'alarme dans le coin supérieur droit de l'armoire, l'interrupteur MARCHE/ARRÊT vers la droite (voir photo). S'assurer que l'alarme se trouve le plus à gauche possible du bord du cadre, afin qu'il y ait suffisamment de place pour la manipulation de l'interrupteur.

Appuyer ensuite l'alarme contre l'armoire pendant 10 secondes pour une adhérence optimale.

2



La distance entre l'alarme et l'aimant ne doit pas dépasser 10 mm. Monter l'aimant le plus près possible de l'alarme et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes pour une bonne adhérence.

3



Mettre le module d'alarme en position "ON" pour tester l'alarme. Fermer ensuite la porte pour que l'alarme s'éteigne automatiquement.

4

