

CompactCase


Montageanleitung / Instructions de montage

Montageanleitung CompactCase

Lieferumfang kontrollieren

1. CompactCase
2. 4x Befestigungsschrauben
3. 4x Dübel
4. 4x Unterlagscheibe
5. 1x Metallischer Türgriff
6. 2x Schrauben zu Türgriff


1

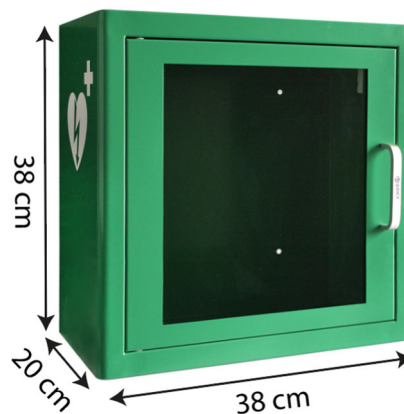

Türe vorbereiten

1. Türe an vormontierter Schnur öffnen
2. Schnur abschneiden
3. Türgriff mit den beiden Schrauben fixieren


2

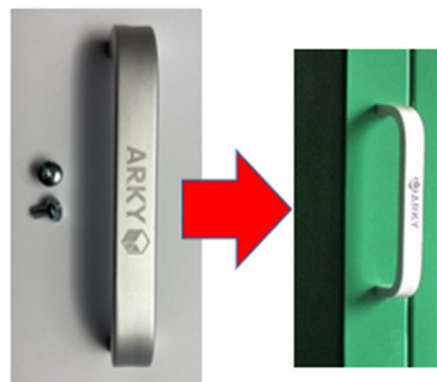

Montage CompactCase

1. CompactCase auf einer gut sichtbaren Höhe platzieren (Richtwert 1.3m ab Boden) und die vier Löcher anzeichnen
2. Vier Löcher für die Dübel bohren
3. CompactCase montieren

3

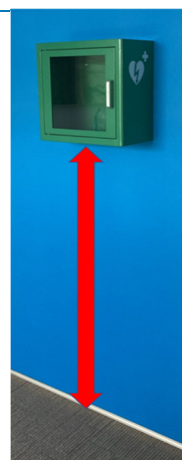

CompactCase


Montageanleitung / Instructions de montage

Instructions de montage CompactCase

Contrôler l'étendue de la livraison

1. CompactCase
2. 4x vis de fixation
3. 4x chevilles
4. 4x rondelles
5. 1x poignée de porte métallique
6. 2x vis pour poignée de porte


1

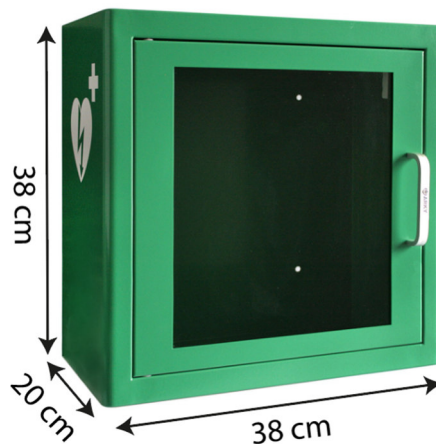

Préparer la porte

1. Ouvrir la porte avec le cordon prémonté
2. Couper le cordon
3. Fixer la poignée de porte avec les deux vis

2

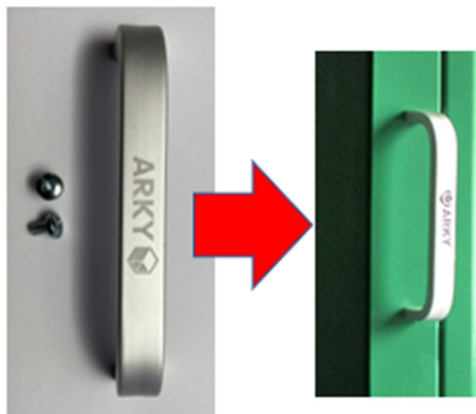

Montage du CompactCase

1. Placer le CompactCase à une hauteur bien visible (valeur indicative : 1,3 m à partir du sol) et marquer les quatre trous.
2. Percer quatre trous pour les chevilles
3. Monter le CompactCase

3

