








Patientenmonitor BeneVision N1 Kurzanleitung

Symbol	Funktion
 Alarm Reset	Setzt das Alarmsystem zurück.
 Alarm Pause	Pausiert die physiologischen Alarme
 Audio Pause	Unterbricht akustische Alarmsignale.
 NIBP Start/Stop	Startet eine NIBP-Messung oder stoppt die aktuelle NIBP-Messung.
 Sperr	Nimmt die Auswahl vor und arbeitet gemäß den Anweisungen zum Entsperren des Touchscreens.
 Entsperren	Nimmt die Auswahl vor und arbeitet gemäß den Anweisungen zum Sperren des Touchscreens.

Symbol	Funktion
 Bildschirm-Setup	Öffnet das Menü Bildschirm-Setup .
 Drucken	Startet das Drucken eines Echtzeit-Berichts.
 Standby	Versetzt den Monitor in den Standby-Modus.
 Manu. Ereignis	Löst ein Ereignis manuell aus und speichert es.
 NIBP-Messung	Öffnet das Menü NIBP-Messung .
 Hauptmenü	Öffnet das Hauptmenü.


Einschalten des Monitors

Drücken Sie den Betriebsschalter, um den Monitor einzuschalten.

Sperren des Touchscreens

Zum Sperren des Touchscreens wählen Sie die Schnellaste **Entsperren** , und schieben Sie den Schieberegler wie angewiesen nach oben.

Entsperren des Touchscreens

Zum Entsperren des Touchscreens wählen Sie die Schnellaste **Sperre** , und schieben Sie den Schieberegler wie angewiesen nach oben.

Für weitere Schnelltasten wischen

Wischen Sie im Bereich „Schnelltasten“ nach unten, um weitere Schnelltasten anzuzeigen.

Schnelle Bedienung durch Wischen über den Bildschirm

Wischen über den Bildschirm mit nur einem Finger:

- Wenn Sie eine Liste oder ein Menü durchblättern möchten, wischen Sie mit dem Finger nach oben bzw. nach unten.
- Auf einem externen Display wischen Sie nach rechts, um den Bildschirm „Minitrends“ bzw. den Bildschirm „EWS“ auf dem externen Display aufzurufen bzw. zu erweitern.

- Auf einem externen Display wischen Sie nach links, um den Bildschirm „Minitrends“ bzw. den Bildschirm „EWS“ auf dem externen Display auszublenden bzw. zu verkleinern.

Wischen über den Bildschirm mit zwei Fingern:

- Auf einem externen Display wischen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, um zu einem anderen Bildschirm zu wechseln. Beispiel: Wenn Sie bei angezeigtem normalem Bildschirm zum Bildschirm „Minitrends“ wechseln möchten, wischen Sie mit zwei Fingern von links nach rechts.
- Zum Entlassen eines Patienten wischen Sie mit zwei Fingern von oben nach unten.

Display

Auswählen eines Bildschirms

1. Zum Aufrufen von **Bildschirm wählen** gibt es folgende Möglichkeiten:
 - ◆ Wählen Sie die Schnelltaste **Bildschirm-Setup** → wählen Sie **Bildschirm wählen**.
 - ◆ Wählen Sie die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie aus der Spalte **Anzeige** die Option **Bildschirm wählen**.
2. Wählen Sie den gewünschten Bildschirm.

Anzeigen von numerischen Werten und Kurven zu Parametern

1. Zum Aufrufen von **Kachel-Layout** gibt es folgende Möglichkeiten:
 - ◆ Wählen Sie die Schnelltaste **Bildschirm-Setup** → wählen Sie die Registerkarte **Kachel-Layout**.
 - ◆ Wählen Sie die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie aus der Spalte **Anzeige Kachel-Layout**.
2. Wählen Sie einen Bereich für numerische Parameter oder einen Kurvenbereich, und wählen Sie dann aus der Popup-Liste ein Element, das in diesem Bereich angezeigt werden soll. Die Parameter und Kurven, die Sie nicht auswählen, werden nicht angezeigt.

EKG-Überwachung

Wählen des EKG-Ableitungstyps

1. Wählen Sie den numerischen EKG-Bereich oder den Kurvenbereich zum Öffnen des Menüs **EKG** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **EKG** die Registerkarte **Setup**.
3. Stellen Sie das **Ableitungsset** entsprechend dem Ableitungstyp ein, den Sie verwenden werden. Standardmäßig ist der Ableitungstyp **Auto** eingestellt. In diesem Fall erkennt der Monitor den verwendeten Ableitungstyp automatisch.

Überprüfen des Schrittmacher-Status

1. Wählen Sie den numerischen EKG-Bereich oder den Kurvenbereich zum Öffnen des Menüs **EKG** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **EKG** die Registerkarte **Pacer**.
3. Stellen Sie **Pacer aktiv** auf **Ja** oder **Nein** ein.

Aktivieren der ST-Überwachung

1. Wählen Sie den numerischen EKG-Bereich oder den Kurvenbereich zum Öffnen des Menüs **EKG** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **ST** → wählen Sie die Registerkarte **Setup**.
3. Schalten Sie die **ST-Analyse** ein.

Aktivieren der Überwachung des QT/QTc-Intervalls

1. Wählen Sie den numerischen EKG-Bereich oder den Kurvenbereich zum Öffnen des Menüs **EKG** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **QT** → wählen Sie die Registerkarte **Setup**.
3. Schalten Sie die **QT-Analyse** ein.

Öffnen des 12-Kanal-Bildschirms

1. Wählen Sie den numerischen EKG-Bereich oder den Kurvenbereich zum Öffnen des Menüs **EKG** aus.
2. Wählen Sie unten auf der EKG-Seite **12-Kanal**.

Sie können den 12-Kanal-Bildschirm auch auf folgende Weise öffnen:




- Wählen Sie die Schnelltaste **Bildschirm-Setup** → Wählen Sie **12-Kanal-EKG**.
- Wählen Sie die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie aus der Spalte **Anzeige** die Option **Bildschirm wählen** → wählen Sie **12-Kanal-EKG**.





Beginnen der Analyse eines 12-Kanal-Ruhe-EKGs

Zum Beginnen einer 12-Kanal-EKG-Analyse wählen Sie links unten auf dem 12-Kanal-Bildschirm **Analyse**.

NIBP-Überwachung

Starten und Stoppen der NIBP-Messung

Vorgang	Durch Schnelltaste	Im NIBP-Menü
Manuelle Messung starten	Schnelltaste NIBP Start/Stop 	Schaltfläche NIBP starten
Automatische NIBP-Messserie starten	Schnelltaste NIBP Start/Stop  Stellen Sie vor dem Starten der automatischen NIBP-Messung sicher, dass das Intervall festgelegt ist.	Registerkarte Setup → Intervall festlegen → Schaltfläche NIBP starten
	Schnelltaste NIBP-Messung  → Intervall festlegen.	

Vorgang	Durch Schnelltaste	Im NIBP-Menü
Start NIBP-Sequenzmessung	Schnelltaste NIBP-Messung  → Sequenz	Registerkarte Sequenz → NIBP-Sequenz festlegen → Schaltfläche NIBP starten
STAT-Messung starten	Schnelltaste NIBP-Messung  → STAT	Schaltfläche STAT
Laufende NIBP-Messungen stoppen	Schnelltaste NIBP Start/Stop 	Schaltfläche NIBP stoppen
Automatische NIBP-Serie oder NIBP-Sequenz beenden	/	Schaltfläche NIBP Alle stoppen
STAT-Messung stoppen und Serie beenden	Schnelltaste NIBP Start/Stop 	Schaltfläche NIBP stoppen oder NIBP Alle stoppen

Einstellen des NIBP-Intervalls

1. Wählen Sie den numerischen **NIBP**-Bereich zum Öffnen des Menüs **NIBP**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Setup**.
3. Stellen Sie die Option **Intervall** ein. Beim Auswählen von **Manuell** wird in den manuellen Modus gewechselt.

IBP-Überwachung

Ändern der Druckbezeichnung

Die Druckbezeichnung ist eine eindeutige Kennung für jeden Drucktyp. Daher müssen Sie eine geeignete Druckbezeichnung für die Druckquelle wählen, die überwacht werden soll.

Zum Auswählen der Druckbezeichnung gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Wählen Sie einen numerischen IBP-Bereich oder einen Kurvenbereich zum Öffnen des entsprechenden Druck-Menüs aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Setup**.
3. Wählen Sie die gewünschte Bezeichnung.

Nullabgleichen des IBP-Messwandlers

1. Schließen Sie den IBP-Messwandler und das IBP-Adapterkabel an den Monitor an.
2. Schließen Sie das Dreiwegeventil (nah am Transducer) in Richtung des Patienten, um den Messwandler durch den Umgebungsdruck zu entlüften.
3. Wählen Sie den numerischen Bereich (z. B. den numerischen Bereich „Art“) und anschließend die Schaltfläche **Nullabgleich**.
4. Schließen Sie nach Abschluss der Nullstellen-Kalibrierung den Sperrhahn in Richtung Luft und öffnen Sie den Sperrhahn in Richtung Patient.

CO₂-Überwachung

Wenn Sie den Monitor N1 zur CO₂-Messung verwenden, schließen Sie den CO₂-Adapter und den Gasprobenschlauch folgendermaßen an.

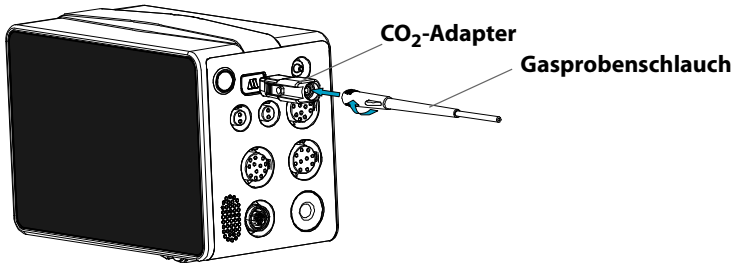

Patientenmanagement

Bearbeiten von Patientendaten

1. Öffnen Sie auf eine der folgenden Weisen das Menü Patientenverwaltung:
 - ◆ Wählen Sie den Bereich für Patienteninformationen in der linken oberen Ecke des Bildschirms.
 - ◆ Wählen Sie die Schnelltaste Hauptmenü → wählen Sie aus der Spalte **Patientenverwaltung** die Option Demographie.
2. Bearbeiten Sie die Patienteninformationen nach Bedarf.

Wenn Sie einen Barcodeleser an Ihren Monitor anschließen, können Sie den Barcode des Patienten scannen, um die Patienteninformationen einzugeben.






Manuelles Entlassen eines Patienten

Öffnen Sie auf eine der folgenden Weisen das Menü **Patient entlassen** auf: Wählen Sie dann das gewünschte Element aus der Popup-Liste aus.

- Wischen Sie auf dem Touchscreen mit zwei Fingern nach unten.
- Wählen Sie die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie aus der Spalte **Patientenverwaltung** die Option **Entlassen**.
- Wählen Sie den Bereich für Patienteninformationen in der linken oberen Ecke des Bildschirms → **Patient entlassen**.

Alarmanzeigen

Alarmstatus-Symbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Alle Alarme sind auf „Pause“ gesetzt.		Akustische Alarmtöne sind auf „Pause“ gesetzt.
	Akustische Alarmsignale sind ausgeschaltet.		Alarme wurden quittiert, und Alarm-System wurde zurückgesetzt
	Einzelne physiologische Alarme sind deaktiviert sind oder das System befindet sich im Status „Alarm aus“.		

Einstellen der Alarmeigenschaften von Parametern

1. Rufen Sie die Seite **Grenzen** durch Auswählen der Schnelltaste **Hauptmenü** auf → wählen Sie aus der Spalte **Alarm** die Option **Grenzen**.
2. Geben Sie ggf. das Kennwort ein.
3. Stellen Sie die Alarm-Eigenschaften wie gewünscht ein.


Ändern der Arrhythmiealarm-Einstellungen

1. Wählen Sie den EKG-Parameterbereich oder den Kurvenbereich zum Öffnen des Menüs **EKG** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Arrhythmie**.
3. Geben Sie ggf. das Kennwort ein.
4. Stellen Sie die Alarm-Eigenschaften wie gewünscht ein.

Auslösen der automatischen Alarmgrenzen

1. Wählen Sie die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie in der Spalte **Alarm** den Eintrag **Grenzen**.
2. Wählen Sie auf der Seite **Grenzen** unten links die Option Autom. Grenzen.
3. Wählen Sie im Bestätigungsdialoefeld **OK**.

Festlegen der Funktion „Pause“

1. Wählen Sie die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie aus der Spalte System die Option Wartung → geben Sie das erforderliche Kennwort ein → wählen Sie .
2. Wählen Sie die Registerkarte **Alarm** → wählen Sie die Registerkarte **Pause/Zurücksetzen**.
3. Stellen Sie Pausen auf **Alarm Pause** oder **Audio Pause** ein.

Pausieren von Alarmen/Pausieren von Alarmtönen

- Drücken Sie die Schnelltaste **Audio Pause**, um Alarmtöne zu pausieren, wenn die Pausenfunktion auf **Audio Pause** festgelegt ist.
- Drücken Sie die Schnelltaste **Alarm Pause**, um physiologische Alarme zu pausieren, wenn die Pausenfunktion auf **Alarm Pause** festgelegt ist.

Zurücksetzen von Alarmen

Drücken Sie die Schnelltaste **Alarm zurücksetzen**, um das Alarmsystem zurückzusetzen.

Aufrufen der Hilfe, wenn technische Alarme auftreten

In der Liste der technischen Alarme enthalten Alarmmeldungen, denen **Details** folgt, Hilfeinformationen.

1. Wählen Sie den Informationsbereich des technischen Alarms, um das Fenster **Alarme** zu öffnen.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Technische Alarme**.
3. Wählen Sie den gewünschten Alarm aus.

Manuelles Aktivieren des Nachtmodus

1. Wählen Sie die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie aus der Spalte **Anzeige** die Option **Nachtmodus**.

2. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen für den Nachtmodus.
3. Wählen Sie **Nachtmodus starten**.

Öffnen des diskreten Modus

Wählen Sie zum Öffnen des diskreten Modus die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie aus der Spalte **Anzeige** die Option **Diskreter Modus** → wählen Sie **OK**.

Konfigurieren des Monitors

Einstellen der Alarmlautstärke

Zum Einstellen der Lautstärke des Alarms wählen Sie die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie in der Spalte **Alarm** den Eintrag **Setup**.

Einstellen der QRS-Lautstärke

Zum Einstellen der QRS-Lautstärke wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie den numerischen EKG-Bereich oder den Kurvenbereich → wählen Sie die Registerkarte **Setup**.
- Wählen Sie den numerischen Bereich oder den Kurvenbereich für SpO₂ → wählen Sie die Registerkarte **PF-Setup**.

Einstellen der Tastenlautstärke

Zum Einstellen der Lautstärke der Tasten wählen Sie die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie aus der Spalte **Anzeige** die Registerkarte **Anzeige**.

Anpassen der Bildschirmhelligkeit

1. Zum Aufrufen von **Anzeige** gibt es folgende Möglichkeiten:
 - ◆ Wählen Sie die Schnelltaste **Bildschirm-Setup** → wählen Sie die Registerkarte **Anzeige**.
 - ◆ Wählen Sie die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie aus der Spalte **Anzeige** die Option **Anzeige**.
2. Stellen Sie die **Helligkeit** ein.

Aufrufen des Außenmodus

Rufen Sie den Außenmodus durch Auswählen der Schnelltaste Hauptmenü auf → wählen Sie aus der Spalte **Anzeige** die Option **Außenmodus aktivieren** → wählen Sie **OK** aus.

Einschätzen von Trends

Wählen Sie die Schnelltaste **Hauptmenü** → wählen Sie eine Option aus der Spalte **Trend**.



Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europa) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg –
Deutschland



046-011824-00(3.0)