

AutoPulse Tragetuch Bedienungsanleitung



INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	3
DEUTSCH.....	4
1. Allgemeine Informationen	4
2. Aufbau	5
3. Faltanleitung	6
4. Anwendung am Patienten	8
5. OPTION: Fach für Ersatz-Akku	10

1. Allgemeine Informationen

Verwendungszweck

Das AutoPulse Tragetuch ist ausschliesslich für den Gebrauch mit AutoPulse (Hersteller: ZOLL Medical) ausgelegt.

Das Tragetuch dient zum Schutz und als Traghilfe für den AutoPulse, sowie als Tragetuch für Patienten, die mit dem AutoPulse reanimiert werden.

Das Tragetuch ist in drei unterschiedlichen Farben erhältlich: Rot, Blau und Dunkelgrün (Militär)

Patientensicherheit

Das Tragetuch darf erst nach Konsultation der Gebrauchsanweisung und nur durch fachlich ausgewiesenes Personal bedient werden.

Da Defekte durch Abnutzung nicht auszuschliessen sind, wird empfohlen das Tragetuch vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden zu untersuchen.

Für Schäden durch unsachgemässe Handhabung durch nicht autorisierte Stellen sowie für die Abnutzung am Material übernimmt Procamed AG keine Verantwortung.

Das Tragetuch ist für ein maximales Patientengewicht von 140 kg ausgelegt.

Wartung und Pflege



Das Tragetuch kann von Hand mit Reinigungsmitteln sowie in der Waschmaschine, bei max. 30° Celsius gewaschen werden. Vorzugsweise mit flüssigem Feinwaschmittel, da Trockenpulver Waschmittelreste auf dem Gewebe hinterlassen kann. Achtung: Bitte niemals schleudern, da sonst die wasserdichte Beschichtung beschädigt werden kann.

Für ausführlichere Infos verweisen wir auf die Webseite des Herstellers (www.pax-bags.de)

Verantwortung des Anwenders

Die Verantwortung für den Einsatz des AutoPulse Tragetuchs liegt beim Produkteinwender.


Erklärung der verwendeten Symbole

	Gebrauchsanweisung beachten
	CE Kennzeichen

Abmessungen

Höhe:	253 cm
Breite:	109 cm
Tiefe:	--
Gewicht:	3600 g

2. Aufbau

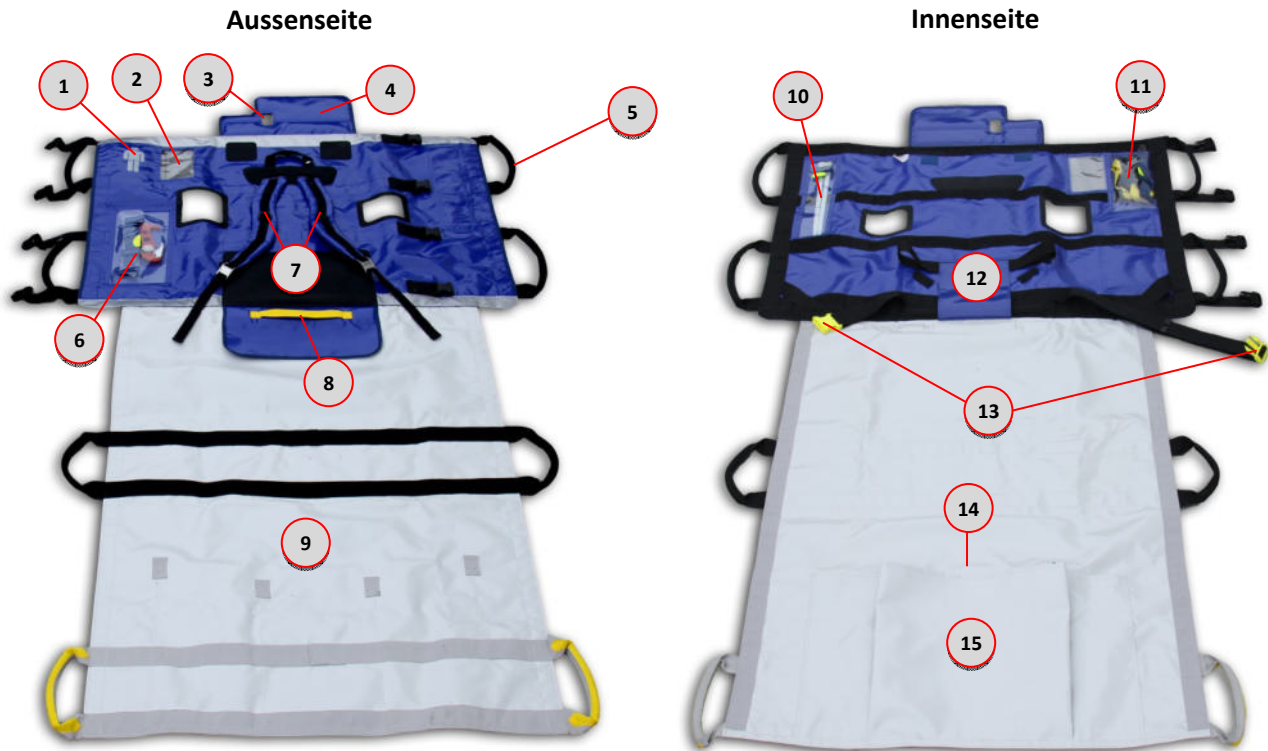

1	Positionierungs-Symbol
2	Fenster für AutoPulse Display
3	Aussparung für On/Off Schalter
4	Schutzflasche am Kopfende
5	Traggriffe (8x)
6	Fach für Schneidewerkzeug
7	Schultertraggurte
8	Griff für AutoPulse-Positionierung
9	Tuch für Patiententransport

10	Fach für Kabelbinder
11	Fach für Schultergurte
12	Lasche für AutoPulse-Befestigung
13	Bauchgurt für Patient
14	Fach für Sauerstoffflasche
15	Fach für Patientenfüsse

3. Faltanleitung

1. Tasche vollständig ausbreiten

Darauf achten, dass die Klettverschlüsse an der Tasche und an der Unterseite des AutoPulse in gutem Zustand sind



2. AutoPulse in Lasche schieben

Darauf achten, dass der AutoPulse perfekt sitzt



3. LifeBand auf AutoPulse zusammenlegen und schwarzen Bauchgurt diagonal auslegen

Auf korrekte Bandposition achten und den Klettverschluss nicht zusammenkleben



4. Graues Tuch voll ausziehen und komplett über AutoPulse legen



5 Graues Tuch in der Mitte zurückfalten



7. Graues Tuch ein weiteres Mal falten, sowie die Lasche an der Kopfseite des Gerätes nach innen falten



8. Sicherstellen, dass die Kabelbinder und die Schultergurte in den jeweiligen Taschen verstaut sind



9. Linke Seite gegen innen falten



10. Rechte Seite gegen innen falten und die vier Schnellverschlüsse schließen

Sicherstellen, dass das Schneidewerkzeug in der Aussentasche verstaut ist



4. Anwendung am Patienten

1. Nachdem der Zustand des untersucht wurde, mit CPR beginnen, sofern nötig

AutoPulse oberhalb des Patientenkopfs positionieren.

Auf Positionierungs-Symbol achten (1)

AutoPulse einschalten




2. AutoPulse Tragetuch öffnen

LifeBand öffnen

Kleider des Patienten verschneiden

Den Patienten aufsetzen

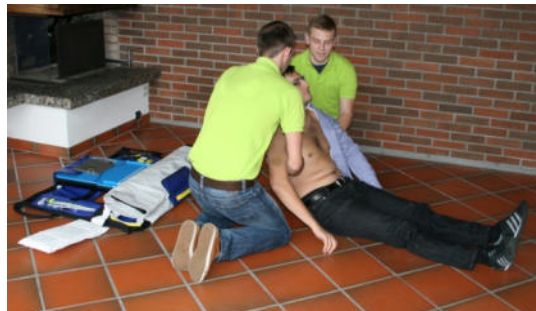

3. Kleider des Patienten entfernen


Den AutoPulse unter den Patienten ziehen

Der Griff für AutoPulse-Positionierung kann dazu verwendet werden (8)



4. Den Patienten so positionieren, dass er mittig (lateral, von links nach rechts) auf dem Brett gelagert ist und die Achseln des Patienten an den gelben Referenzmarkierungen am AutoPulse ausgerichtet sind

Falls vorhanden: Elektroden aufkleben

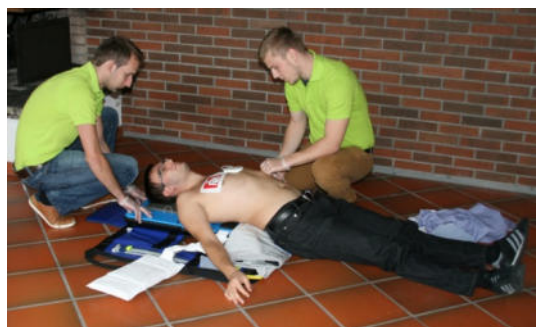

5. Das LifeBand über dem Brustkorb des Patienten schliessen

Die Anweisungen des Gerätes befolgen

Für weitere Informationen verweisen wir auf das Benutzerhandbuchs des AutoPulse

Kompressionen Starten



6. Das Tragetuch kann weiter ausgezogen werden, so dass die Unterseite des Patientenkörper auf dem Tuch zu liegen kommt

Dazu an den gelben Griffen sanft und horizontal am Boden entlang ziehen



7. Bevor der Patient transportiert oder umgelagert wird sollten die Füße im entsprechenden Fach (15) untergebracht werden
Zusätzlich kann der Patient mit dem Bauchgurt (13) sowie den Schultergurten (11) gesichert werden



5. OPTION: Fach für Ersatz-Akku

1. Akku ins Fach versorgen



2. Fach auf Kopfhöhe des AutoPulse legen und Lasche in rechte Befestigungsschleife einfädeln



3. Lasche leicht anziehen und in linker Befestigungsschleife einfädeln



4. Schlaufe leicht anziehen und zurückschlagen



Vor Einsatz des AutoPulse am Patienten muss das Fach für den Ersatz-Akku vom Brett entfernt werden!
Dazu die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

Diese AutoPulse Tragetuch Bedienungsanleitung wurde im Februar 2022 gedruckt.
Falls das Druckdatum über 1 Jahr zurück liegt, fragen Sie bei Procamed AG nach,
ob eine aktualisierte Version verfügbar ist.

Procamed AG
Schulstrasse 5
CH-8355 Aadorf

Tel. +41 52 368 60 00
Fax. +41 52 368 60 01
E-Mail info@procamed.ch

