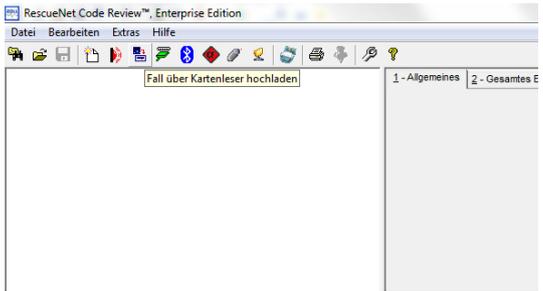
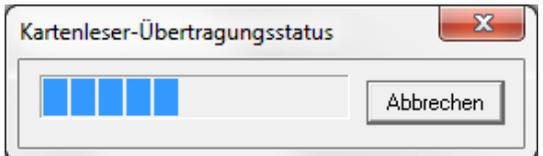


<h2>Daten über PCMCIA Karte auslesen</h2> <p>ausführliche Dokumentation unter: www.zolldata.com/c-r-downloads</p>		
1.	<p>PCMCIA Karte in Karten-Slot beim Defi einschieben.</p> <p><i>Falls das Gerät bereits läuft, werden die Daten erst ab diesem Zeitpunkt auf die Karte gespeichert (vorgängige Daten gehen verloren)</i></p>	
2.	<p>Nach Fallende die PCMCIA Karte aus dem Defi entfernen und den Kartenleser OmniDrive einlegen.</p> <p><i>Der Kartenleser muss angeschlossen und korrekt installiert sein</i></p>	
3.	<p>RescueNet CodeReview starten</p> <p><i>Die Software muss installiert und korrekt eingerichtet sein.</i></p>	
4.	<p>Über den Button „Fall über Kartenleser hochladen“ die Daten aus der Karte auf den PC speichern</p> <p><i>Daten werden im voreingestellten Zielverzeichnis abgespeichert</i></p>	
5.	<p>Daten werden hochgeladen und in der Software für die Auswertung angezeigt</p>	
6.	<p>Falls gewünscht, können die Daten auf der Karte nach erfolgreichem Hochladen gelöscht werden</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Extras b) Daten löschen c) Über Kartenleser <p><i>Falls eine Formatierungs-Aufforderung von Windows erscheint, muss diese abgebrochen werden (Eine Windows-Formatierung ist nicht möglich)</i></p> <div data-bbox="245 1845 549 1993" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Microsoft Windows</p> <p>Sie müssen den Datenträger in Laufwerk K: formatieren, bevor Sie ihn verwenden können.</p> <p>Möchten Sie ihn formatieren?</p> <p><input type="button" value="Datenträger formatieren"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p> </div> <p><i>In den Einstellungen der Software kann auch eine automatische Löschung aktiviert werden</i></p>	