

Instructions de montage du module d'alarme

CompactCase

Montage du module d'alarme



1. Le module d'alarme se compose de l'alarme et d'un aimant. Les deux parties sont équipées d'une bande adhésive pour le montage.

Informations sur les piles

Type de pile : AG13


Quantité : 3 pcs.

Durée de vie : env. 2 ans



2. Retirer le film de protection de la bande adhésive au dos de l'alarme. Placer l'alarme dans le coin supérieur droit de l'armoire, l'interrupteur « ON/OFF » vers la droite (voir photo). S'assurer que l'alarme se trouve le plus à gauche possible du bord du cadre, afin qu'il y ait suffisamment de place pour la manipulation de l'interrupteur.

Appuyer ensuite l'alarme contre l'armoire pendant 10 secondes pour une adhérence optimale.

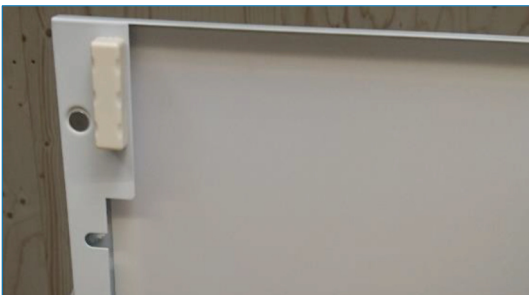

3. La distance entre l'alarme et l'aimant ne doit pas dépasser 10 mm. Monter l'aimant le plus près possible de l'alarme et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes pour une adhérence optimale.



4. Mettre le module d'alarme en position « ON » pour tester l'alarme. Fermer ensuite la porte pour que l'alarme s'éteigne automatiquement.