



Commandez-le directement ici:
beaty.procamed.ch

En exclusivité chez:

Procamed AG
Schulstrasse 5
CH-8355 Aadorf

Tél 052 368 60 00
info@procamed.ch
www.procamed.ch



Lorsque chaque seconde compte
Beaty est toujours à portée de main



POURQUOI BEATY?

Beaty vous aide à réaliser un massage cardiaque efficace. Grâce à ses commentaires audio, il vous permet de savoir si votre profondeur de massage de 5 cm est atteinte.



La **plupart** des arrêts cardiaques se passent à la maison.



A environ **4 minutes** d'arrêt cardiaque, les lésions cérébrales sont quasi irréparables. Cela peut être amélioré par un massage cardiaque efficace d'au moins 5 cm.

X3

Une réanimation efficace par des passants peut **tripler** les chances de survie.



70% des premiers répondants se sentent perdus devant un arrêt cardiaque et ne savent pas comment bien réagir.



Atteindre la profondeur exacte est quasiment impossible pour tout à chacun.


COMMENT UTILISE-T-ON LE BEATY?





Dans le cas d'un arrêt cardiaque (sans signes vitaux) appelez de suite le **144**.

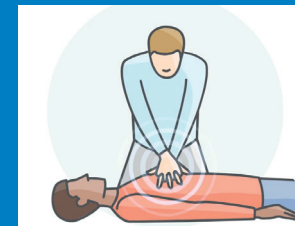

Placez le Beaty sur le centre du thorax et commencez à appuyer jusqu'à entendre un **BIP**.



Appuyez fort et vite - si vous **n'entendez rien** - appuyez encore **plus fort**.

-  BIP = efficace
-  pas de BIP = inefficace