


# **Addendum SurePower™ II -- Guide de l'opérateur du chargeur SurePower™**

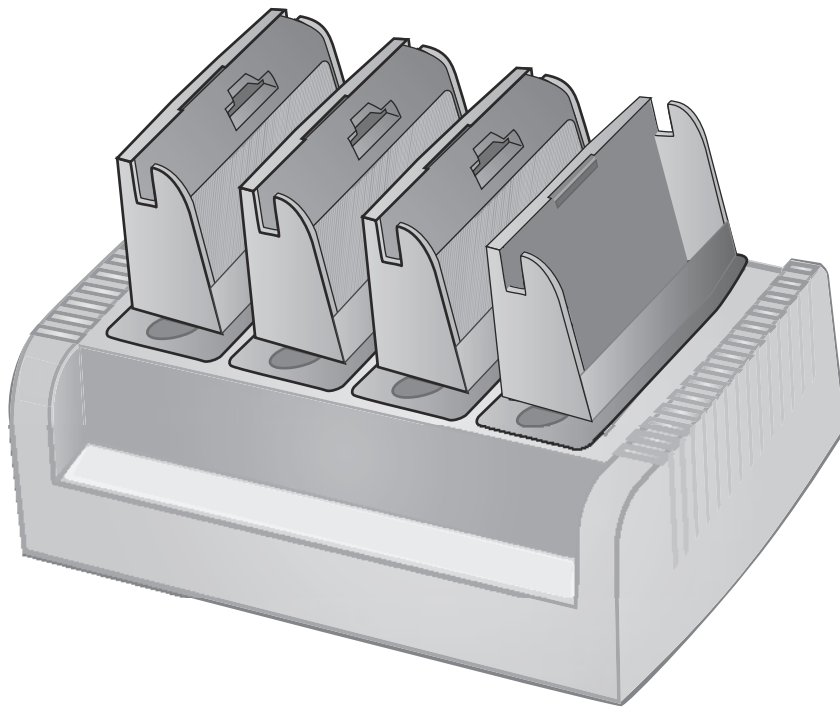

**ZOLL**®

9652-000397-02 Rev. C

**L'addendum *SurePower*™ II du Guide de l'opérateur du chargeur *SurePower***  
**(REF 9652-000397-02 Rev. C) a été imprimé en mars 2022.**

SurePower, X Series et ZOLL sont des marques ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2022 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés.



**ZOLL Medical Corporation**

269 Mill Road  
Chelmsford, MA USA  
01824-4105



**EC REP**

**ZOLL International Holding B.V.**

Newtonweg 18  
6662 PV ELST  
The Netherlands

**CH REP**

**ZOLL Medical Switzerland A.G.**

Bahnhofstrasse 20  
6300, Zug  
Switzerland



0123

---

# SurePower™ II -- Guide de l'opérateur du chargeur SurePower™

Cet addendum fournit des informations spécifiques à l'utilisation du chargeur ZOLL® Medical Corporation *SurePower™* en ce qui concerne les tests, le recalibrage et la charge de la batterie *SurePower™ II*.

Pour des informations générales sur l'utilisation du chargeur *SurePower™*, les avertissements, précautions et remarques généraux, se reporter au Guide de l'opérateur du chargeur *SurePower™* (9650-0535-02, Révision B ou supérieure).

Il est important que vous lisiez et compreniez les informations contenues dans cet addendum et le **Guide de l'opérateur du chargeur SurePower™**. Le fonctionnement des unités X Series™ et Propaq® M/MD repose sur le chargement et l'entretien corrects des batteries *SurePower II*.

## Sécurité

Le paragraphe qui suit comporte des avertissements, des précautions et des remarques sur l'utilisation de la batterie *SurePower II* avec le chargeur SurePower. Risque de pincement lors de la mise en place d'une batterie ou d'un adaptateur pour chargeur SurePower II dans un compartiment.

### Avertissement

- Risque de pincement lors de la mise en place d'une batterie ou d'un adaptateur pour chargeur SurePower II dans un compartiment.

### Précaution

- Lors de l'utilisation du chargeur SurePower pour charger et tester les batteries *SurePower II*, veillez à disposer d'adaptateurs pour chargeur utilisables avec le chargeur.
- Ne stockez pas de batteries dans les adaptateurs pour chargeurs, au risque que la batterie ne se décharge plus vite.

### Remarque

- L'utilisation des adaptateurs pour chargeur *SurePower II* ne modifie pas les fonctions du chargeur SurePower : toutes les fonctions du chargeur SurePower sont telles que décrites dans le guide de l'opérateur correspondant (9650-0535-02, Révision B ou supérieure).
- Si vous retirez la batterie avant la fin de la charge, le chargeur SurePower émet une alerte sonore.
- Si un test de capacité de la batterie complètement chargée n'est pas satisfaisant et si le témoin **Panne** est allumé, le chargeur SurePower émet une alerte sonore. Ne pas utiliser cette batterie.

## Nettoyage

Clean *SurePower II* Charger Adaptors with a soft cloth, mild soap, and water.

N'immergez pas les adaptateurs pour chargeur dans l'eau. N'utilisez pas d'alcool ou de cétones (méthyléthylcétone, acétone, etc.). Ne passez pas les adaptateurs pour chargeur à l'autoclave

## Spécifications de l'adaptateur pour chargeur *SurePower II*

|  |   |
|--|---|
| <b>Taille</b>  | 22,7 (longueur) x 14,6 (largeur) x 8,6 (hauteur) cm                             |
| <b>Poids</b>   | 0,8 kg  |
| <b>Type</b>  | IEC Classe I  |
| <b>Normes de conception</b>                            | Respecte ou dépasse les normes applicables<br>UL 60601-1, EN 60601-1.           |
| <b>Température de fonctionnement</b>                   | 0 °C à 50 °C  |
| <b>Température de stockage à court terme/transport</b> | -40 °C à 70 °C  |
| <b>Humidité</b>  | Humidité relative, sans condensation, 30 à 93 %                                 |
| <b>Altitude de service</b>                             | -91 m à 6096 m (au-dessous et au-dessus du niveau de la mer)<br>1060 à 500 mBar |
| <b>Protection contre les particules et l'eau</b>       | IP X2   |