

## Remarque

Le guide de référence rapide du module de PNI BP10 n'est pas destiné à remplacer le manuel d'utilisation du module PNI BP10. Avant d'utiliser l'appareil, l'utilisateur doit avoir pris connaissance des informations contenues dans le manuel d'utilisation. Ce document fait office de procédure à n'utiliser qu'en complément d'une formation pratique complète.

## Fabricant

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.  
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech industrial park, Nanshan, Shenzhen  
518057, République populaire de Chine  
Tél. : +86 755 81888998  
Fax : +86 755 26582680  
www.mindray.com



Conforme aux exigences de la  
Directive 93/42/CEE du Conseil.  
Conforme à la Directive 2011/65/EU du Conseil.



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hambourg, Allemagne



Tous droits réservés.



046-008375-00(1.0)

# Module PNI BP10

## Guide de référence rapide

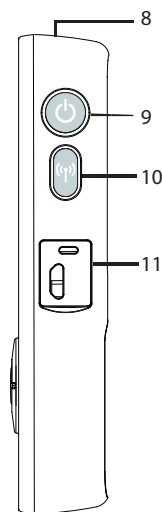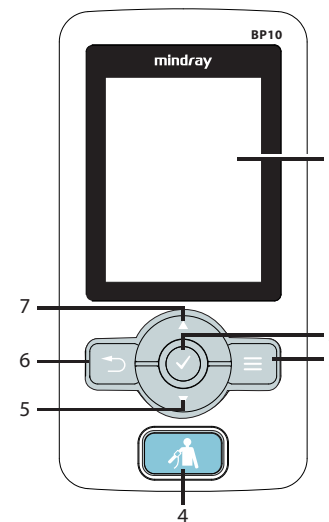

1. Ecran
2. Touche de confirmation  
Appuyez sur cette touche pour sélectionner ou activer la fonction correspondante.
3. Touche Menu principal
4. Touche Marche/Arrêt de la PNI
5. Touche Flèche bas
6. Touche Retour  
Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent et sauvegarder les réglages.
7. Touche Flèche haut
8. Connecteur du brassard PNI
9. Touche Marche/Arrêt  
Appuyez sur cette touche pour allumer le dispositif.  
Si l'appareil est sous tension, maintenez cette touche enfoncée pour afficher le menu de confirmation de mise hors tension.  
Si l'écran est allumé, appuyez sur cette touche pour l'éteindre.
10. Touche MPAN (Mindray Patient Area Network, réseau de zone patient Mindray)  
Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonctionnalité MPAN.
11. Connecteur USB

**mindray**

## Symboles

Les symboles ou libellés suivants peuvent s'afficher à l'écran :



Ce symbole s'affiche lorsque l'alarme technique sonore est désactivée.



Ce symbole s'affiche lorsque la fonctionnalité MPAN est activée.



Indique l'état de charge de la batterie. Le niveau de charge restant de la batterie est indiqué en blanc.




Indique la catégorie du patient. Le réglage de la catégorie pour le patient actuel est indiqué en blanc.

PNI-XXX Représente le nom du dispositif.

## Sélection et configuration d'une option

- Utilisez les touches et pour déplacer la barre de mise en surbrillance jusqu'à l'option souhaitée.
- Appuyez sur la touche pour sélectionner l'option mise en surbrillance.
- Si une option peut être configurée, des flèches Haut et Bas sont affichées autour de l'option sélectionnée, comme illustré sur la figure ci-dessous.

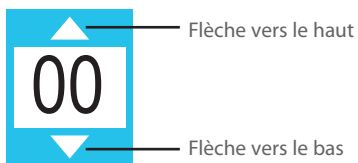

- Utilisez les touches et pour parcourir les options disponibles.
- Appuyez sur la touche pour sélectionner l'option appropriée lorsque celle-ci s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche pour sauvegarder le réglage et quitter le menu.

## Mode de mesure

Configurez le mode de mesure en accédant à l'option **Mode** dans le menu principal.

Mode	Description
Manuel	Une mesure est effectuée sur commande manuelle.
Auto	Les mesures sont effectuées automatiquement à l'intervalle configuré.
Séquence	Les mesures sont effectuées automatiquement dans l'ordre défini par l'utilisateur, ce qui permet de définir différentes mesures sur cinq phases consécutives.
MAPA (Monitoring ambulatoire de la pression artérielle)	Les mesures sont effectuées automatiquement en fonction des intervalles configurés pour le jour et la nuit.
Continu	Les mesures sont effectuées l'une après l'autre sur une période de cinq minutes.

## Démarrage et arrêt des mesures

Mode	Tâches	Actions
Manuel	Pour démarrer ou arrêter une mesure.	Appuyez sur la touche .
Auto	Pour démarrer une série de mesures.	Appuyez sur la touche .
Séquence	Pour annuler la série de mesures.	Sélectionnez <b>Arrêter ttes</b> dans le menu principal.
MAPA	Pour arrêter la mesure en cours.	Appuyez sur la touche .
Continu	Pour démarrer la série de mesures.	Sélectionnez <b>STAT PNI</b> dans le menu principal.
	Pour annuler la série de mesures.	Appuyez sur la touche  ou sélectionnez <b>Arrêter ttes</b> dans le menu principal.