

Moniteur de signes vitaux VS-900

Guide d'utilisation rapide



Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen 518057 République Populaire de Chine Chine

Site web : www.mindray.com

Tel. : +86 755 81888998

Fax : +86 755 26582680



Le contenu de ce guide est sujet à modifications sans préavis.

Le moniteur permet aux médecins ou au personnel médical sous la direction de médecins de surveiller des paramètres physiologiques, comme la SpO_2 , la FP, la PNI, la température et le CO_2 , chez des patients adultes, pédiatriques et néonataux en établissement de santé.

AVERTISSEMENT :

L'appareil doit être connecté à une prise d'alimentation électrique correctement installée, protégée par une ligne de mise à la terre. Si l'installation n'est pas protégée par une mise à la terre, débranchez l'appareil de la prise d'alimentation et utilisez l'alimentation sur batterie, si nécessaire.






© Copyright 2013-2016 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

mindray

Guide d'utilisation rapide du moniteur de signes vitaux VS-900

Il s'agit d'un guide d'utilisation rapide. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur VS-900 (réf. : 046-004884-00).


Touches et fonctions

	<p>Interrupteur Marche/Arrêt d'alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour mettre le moniteur sous tension. Appuyez sur cette touche pour passer en mode Veille ou le quitter. Lorsque le moniteur est sous tension, maintenez cette touche enfoncée pendant plus de 2 secondes pour mettre le moniteur hors tension.
	<p>Touche Réinit. Alarme</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour désactiver le son des alarmes actives. Maintenez cette touche enfoncée pendant plus de 2 secondes pour suspendre ou rétablir les alarmes.
	<p>Touche Marche/Arrêt de la PNI</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour démarrer ou arrêter les mesures PNI.
	<p>Touche d'admission d'un patient</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour admettre un nouveau patient. Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran principal.
	<p>Sélecteur</p> <ul style="list-style-type: none"> Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour régler le curseur. Appuyez sur le sélecteur pour sélectionner une option, comme l'accès à un menu ou la validation d'une option sélectionnée.

Interfaces et menu

Connecteurs latéraux et enregistreur

Face arrière

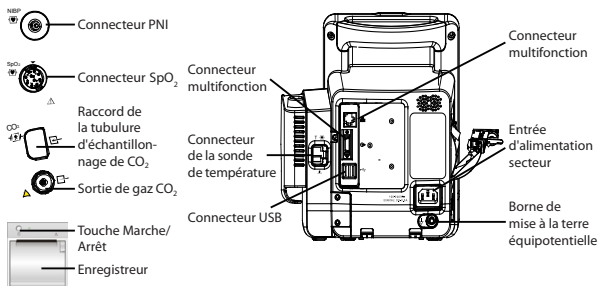

Modes opératoires

- Mode Surveillance :** Le moniteur passe automatiquement en mode Surveillance dès qu'il est mis sous tension. Le mode de surveillance est un mode courant, qui permet de surveiller les signes vitaux d'un patient.
- Mode Mesure Ponc :** Le mode Mesure Ponc est destiné à réaliser des mesures ponctuelles sur une période courte. Lorsque le mode de mesure ponctuelle est activé, le message **[Mesure Ponc]** s'affiche dans la partie supérieure de l'écran. Pour passer en mode de mesure ponctuelle, sélectionnez **[Principal]** → **[Maintenance >>]** → **[Régl. utilisat. >>]** → saisissez le mots de passe requis → définissez **[Mesure Ponc]** sur **[Mar]**.
- Mode Veille :** En mode Veille, la surveillance du patient actuel est terminée, mais le moniteur est toujours sous tension. Pour passer en mode Veille, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation. Un avertissement s'affiche. Sélectionnez **[Oui]** pour passer en mode Veille.
- Mode Démo :** Le mode Démo est protégé par un mot de passe. Il n'est utilisé qu'à des fins de démonstration. Pour passer en mode démo, sélectionnez **[Principal]** → **[Maintenance >>]** → **[Mode Démo >>]** → saisissez le mot de passe correspondant → sélectionnez **[OK]**.