


Guide de référence rapide de la pompe à seringue


Verrouillage de l'écran tactile


Pour verrouiller l'écran tactile, faites glisser votre doigt de haut en bas sur l'écran tactile, puis sélectionnez .

Déverrouillage de l'écran tactile

Pour déverrouiller l'écran tactile, appuyez n'importe où sur celui-ci et faites glisser le curseur comme indiqué.

Chargement d'une seringue

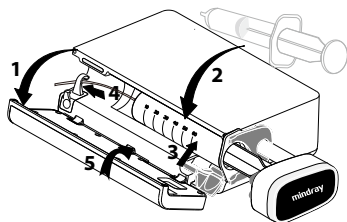




1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation  pour mettre la pompe sous tension.
2. Ouvrez la porte (1) et tirez la pince de seringue vers le bas.
3. Placez la seringue dans le logement (2) de la seringue, en vous assurant que la bride du réservoir se trouve dans l'espace entre la pompe et la pince de la bride de la seringue.
4. Soulevez la pince de la seringue jusqu'à ce qu'elle verrouille le cylindre (3) de la seringue.
5. Placez la conduite d'extension dans le crochet de kit d'extension (4).
6. Fermez la porte (5) de la pompe.

AVERTISSEMENT : vérifiez que la seringue et la conduite d'extension sont correctement connectées et qu'il n'y a pas de fuite.

Exécution d'une perfusion

Après avoir chargé une seringue, procédez à la perfusion en respectant les instructions suivantes :

1. Sélectionnez la marque de la seringue et définissez les paramètres de perfusion. Sélectionnez le médicament si nécessaire.
2. Purgez la ligne de perfusion et connectez la ligne d'extension au patient.
3. Appuyez sur  pour démarrer la perfusion.
4. Appuyez sur  pour arrêter la perfusion
5. Déchargez la seringue. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation  pour mettre la pompe hors tension.

AVERTISSEMENT : vérifiez que la marque de la seringue est correctement sélectionnée avant de commencer la perfusion.

Configuration de la pompe

Pour configurer la pompe, faites glisser votre doigt de haut en bas sur l'écran tactile, puis sélectionnez **Menu**.

- ◆ Sélectionnez **Option génér.** pour définir le seuil de pression d'occlusion, etc
- ◆ Sélectionnez **Options syst.** pour régler le volume de l'alarme, la luminosité de l'écran, etc

Symboles de l'état d'alarme



: Les alarmes sonores sont en pause.





: Les alarmes sont acquittées et l'alarme est réinitialisée.




: Les alarmes sont acquittées et le son du rappel est émis.

Mise en pause de l'alarme sonore

Pour passer à l'état de Pause audio, choisissez l'une des méthodes suivantes :

- ◆ Sélectionnez  dans l'écran alarme.
- ◆ Faites glisser votre doigt de haut en bas sur l'écran tactile et sélectionnez .

Réinitialisation des alarmes

Lorsqu'une alarme se déclenche, appuyez sur  pour acquitter et réinitialiser l'alarme.

Solutions d'alarme

Alarme	Solution
Occlusion	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que la tubulure n'est pas pliée ou endommagée.◆ Vérifiez le réglage du seuil de pression. Augmentez le seuil si nécessaire.
Seringue dégagée	Rechargez la seringue.
Erreur piston seringue	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que les pinces du plongeur ne sont pas bloquées.◆ Ouvrez ou fermez manuellement les pinces du plongeur.◆ Si l'alarme persiste, contactez votre service technique.
Ligne extension détach.	Vérifiez et rebranchez le kit d'extension.

AVERTISSEMENT : lorsqu'une alarme se déclenche, vérifiez l'état de la pompe et traitez l'alarme dès que possible. Si les alarmes ne sont pas conformes à la situation actuelle, contactez votre service technique. Pour les solutions d'autres alarmes, consultez le manuel de l'opérateur.



046-020696-00(1.0)