

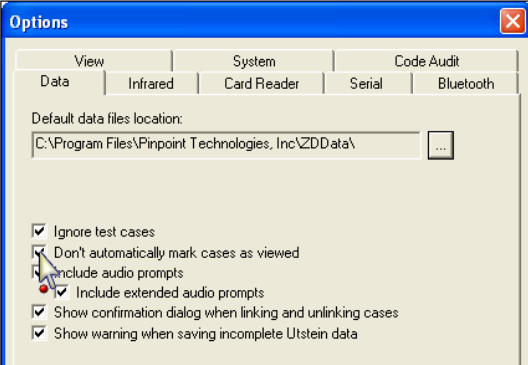


<h2>Télécharger des cas de la carte PCMCIA (Configuration)</h2> <p>You find full description under: <a href="http://www.zolldata.com/c-r-downloads">www.zolldata.com/c-r-downloads</a></p>		
<p><b>1.</b></p>	<p>Installer le lecteur de carte externe OmniDrive</p> <p><i>Win 32bit: OmniDrive USB Driver (V3.12)</i>  <i>Win 64bit: OmniDrive USB_64bit Driver (V3.31)</i></p>	
<p><b>2.</b></p>	<p>Installer RescueNet CodeReview</p> <p><i>Version actuelle:</i>  <a href="http://www.zolldata.com/c-r-downloads">www.zolldata.com/c-r-downloads</a></p> <p><i>Requis: Microsoft .NET Framework 4.0</i>  <i>(disponible sur le même site web)</i></p>	
<p><b>3.</b></p>	<p>Démarrer RecueNet CodeReview et aller dans Outils - Options</p>	
<p><b>4.</b></p>	<p>Sélectionner dans la section “Données” dans quel fichier les cas téléchargés seront enregistrés.</p> <p><i>Important: l'utilisateur doit avoir un accès écrit autorisé pour le dossier sélectionné</i></p>	
<p><b>5.</b></p>	<p>Choisir dans la section “Lecteur de carte” l’onglet “Externe”</p> <p><i>Si désiré, on peut activer l’effacement automatique de la carte après téléchargement des cas</i></p>	

**6. Vérifier la configuration du défibrillateur**

1. Démarrer la configuration du système  
(presser et tenir les touches soft gauche et droit et allumer l'appareil simultanément)
2. Entrer le mot de passe configuration  
(0 0 0 0 0 0 0)
3. Choisir la langue et confirmer avec la touche soft <Enter>
4. Presser <Change Config>

**ZOLL E-Series (Rev. 7.42):**

Tous les paramètres sont enregistrés dans l'option "Carte Données" (Page 6 de 7)

Ce paramètre **doit** être reprogrammé sur "Oui":

- a) Page 1 de 4 (Enregistrement ECG en mode Advisory /RECORD ECG IN ADVISORY MODE)

Ces paramètres peuvent être programmés individuellement :

- a) Page 1 de 4: Enreg. Audio Mode Consult
- b) Page 1 de 4: Enreg. SPO2 Mode Consult
- c) Page 2 de 4: Enreg. etCO2 Mode Consult
- d) Page 2 de 4: Erreur Carte Mémoire
- e) Page 2 de 4: Effacer Carte
- f) Page 3 de 4: Message Capacité Carte Activé
- g) Page 3 de 4: Message Effacer Carte à l'Arrêt
- h) Page 3 de 4: Message Retirer Carte à l'Arrêt
- i) Page 4 de 4: Défib Sync. Exclue

**ZOLL M-Series (Rev. 39.10): No CHECK !!!**

Ces paramètres doivent être programmés sur "Oui":

- a) Page 7 Step 3 (Sauver sur carte en mode auto moniteur/STORE TO CARD IN AUTO MONITOR MODE)
- b) Page 8 Step 3 (Enregistrer ECG en mode Advisory/RECORD ECG IN ADVISORY MODE)

Ces paramètres peuvent être programmés individuellement:

- a) Page 1 Step 2 (autorise effacement carte/ALLOW CARD ERASE)
- b) Page 9 Step 1 (enregistrement Audio en mode Advisory/RECORD AUDIO IN ADVISORY MODE)
- c) Page 9 Step 2 (Défib synch. Exclue/SYNC DEFIB EXCLUDED)
- d) Page 13 Step 3 (Rapport erreur carte mémoire/REPORT MEMORY CARD ERRORS)
- e) Page 26 Step 1 (Message capacité de carte active/CARD CAPACITY MESSAGE ENABLED)
- f) Page 26 Step 2 (Message effacement carte qd appareil éteint/ERASE CARD PROMPT AT OWR OFF)
- g) Page 26 Step 3 (Message retrait carte qd appareil éteint/REMOVE CARD PROMPT AT PWR OFF)
- h) Page 29 Step 2 (Enregistre données compressions RCP/RECORD CPR COMPRESSION DATA)