


Istruzioni

ZOLL X Series

copiare la configurazione

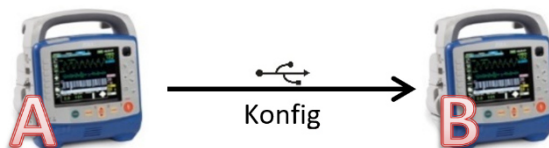

1.	Accendere l'unità (A)	
2.	inserire la chiavetta USB	
3.	Attendere che il simbolo USB venga visualizzato sul monitor Se il simbolo non appare, controllare il collegamento della chiavetta USB e, se necessario, utilizzare un'altra chiavetta.	
4.	premere il tasto del cambiopagina	
5.	premere tasto impostazioni	
6.	selezionare Supervisore	
7.	Inserire codice Confermare con Salva	
8.	selezionare Visual./Configurazine	
9.	selezionare Esporta configurazione	
10.	aspettare che il processo di esportazione sia terminato	
11.	Confermare con OK e togliere la chiavetta USB. Spegnerne l'unità.	
12.	Accendere l'unità (B)	
13.	Ripetere i punti (2.) a (8.) su l'unità (B)	
14.	Selezionare Importa configuraz.	
15.	Accettare lo domanda di sicurezza con Si	
16.	aspettare che il processo di importazione sia terminato	
17.	Confermare con OK e togliere la chiavetta USB. L'unità verrà resettata automaticamente.	
18.	Infine controllare I seguenti dati (individuale per ogni unità): I dati li trovate sotto > Impostazioni > Supervisore > Visual./Configurazione > Info dispositivo 1. ID unità Utilizzato nella telemetria 12Lead come ID del dispositivo e numero di richiamo (ID unità/NrRichiamo) e indicato sulla stampa come unità 2. Nome reparto Utilizzato nella telemetria 12Lead come (reparto.) 3. Telefono contatto Questo dato non appare nelle telemetria 12Lead e neanche sulla stampa! Di solito questo punto non viene compilato. IMPORTANTE: Il dato ID unità non viene sovrascritto durante l'importo della configurazione!	

Se con l'unità viene eseguita la telemetria 12Lead, la lista di distribuzione deve essere aggiornata.	
I.	Aprire Menu Telemetria (cliccare sul simbolo Antenna)
II.	Selezionare il punto Aggiorna lista distribuzione I dati vengono sincronizzati con il server ZOLL e appare il messaggio "trasmissione completata"