


Supplemento SurePower™ II -- Guida all'uso del caricabatterie SurePower™

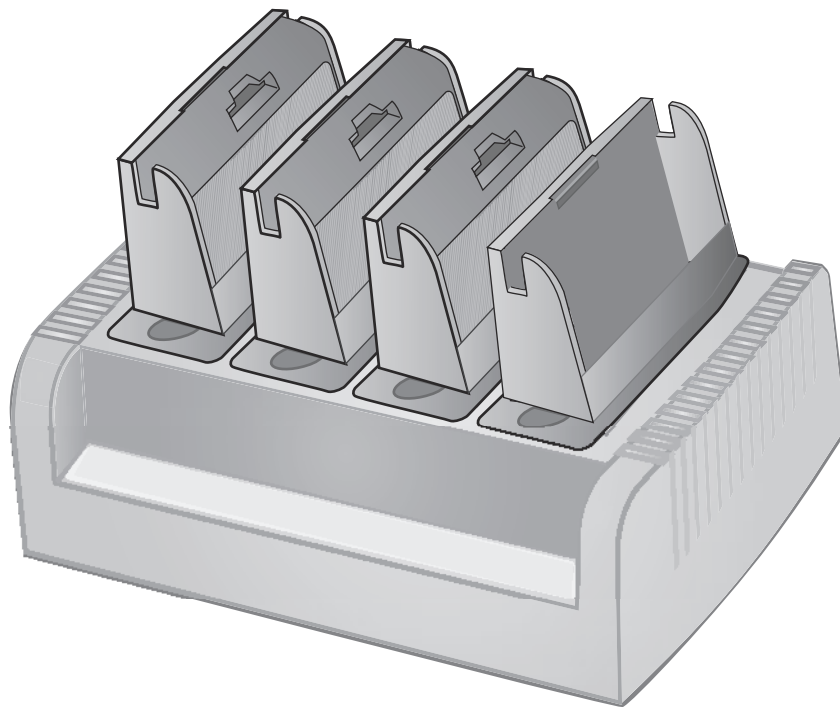

ZOLL®

9652-000397-11 Rev. C

Il supplemento **SurePower™ II** -- Guida all'uso del caricabatterie *SurePower™* (REF 9652-000397-11 Rev. C) è stato pubblicato nel **marzo 2022**.

SurePower, X Series e ZOLL sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Copyright © 2022 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati.



ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road
Chelmsford, MA USA
01824-4105



EC REP

ZOLL International Holding B.V.

Newtonweg 18
6662 PV ELST
The Netherlands

CH REP

ZOLL Medical Switzerland A.G.

Bahnhofstrasse 20
6300, Zug
Switzerland



0123

Supplemento *SurePower*TM II -- Guida all'uso del caricabatterie *SurePower*TM

In questo supplemento vengono fornite informazioni specifiche per l'utilizzo del caricabatterie *SurePower*TM di ZOLL[®] Medical Corporation per eseguire il test, la ricalibrazione e il caricamento dei gruppi batteria di *SurePower*TM II.

Per informazioni generali sull'impiego del caricabatterie *SurePower*TM e per tutte le note, indicazioni di attenzione e avvertenze di carattere generale, consultare la Guida all'uso del caricabatterie *SurePower*TM (REF 9650-0535-11, Revisione B o successiva).

È importante leggere e comprendere le informazioni contenute nel presente supplemento e nella Guida all'uso del caricabatterie *SurePower*TM. Per ottenere un funzionamento affidabile delle unità X SeriesTM e Propaq[®] M/MD è necessario eseguire correttamente il caricamento e la manutenzione dei gruppi batteria *SurePower*TM II.

Sicurezza

In questa sezione vengono fornite avvertenze, indicazioni di attenzione e note relative all'utilizzo del gruppo batteria *SurePower* II con il caricabatterie *SurePower*.

Avvertenza

- Durante l'installazione di un gruppo batteria o di un connettore caricabatterie *SurePower* II, le dita potrebbe rimanere incastrate.

Attenzione

- Quando si utilizza il caricabatterie *SurePower* per caricare o testare i gruppi batteria *SurePower* II, assicurarsi che sia disponibile una fornitura di connettori caricabatterie da utilizzare con il caricabatterie.
- Non conservare i gruppi batteria nei connettori caricabatterie -- in questo modo aumenta la velocità di scaricamento del gruppo batteria.

Nota

- L'uso dei connettori caricabatterie *SurePower* II non modifica il funzionamento del caricabatterie *SurePower*: tutte le funzioni del caricabatterie *SurePower* vengono descritte nella Guida all'uso del caricabatterie *SurePower*TM (REF 9650-0535-11, Rev. B o successiva).
- Se si rimuove un gruppo batteria prima che sia completamente carico, dal caricabatterie *SurePower* viene emesso un segnale acustico di notifica.
- Se il test di capacità del gruppo batteria completamente carico ha avuto esito negativo e il LED di **errore** è acceso, dal caricabatterie *SurePower* viene emesso un segnale acustico di notifica. Non usare questo gruppo batteria.

Pulizia

Pulire i connettori caricabatterie *SurePower II* usando un panno morbido, detergente delicato e acqua.

Non immergere nell'acqua i connettori caricabatterie. Non utilizzare alcool o chetoni (metiletilchetone, acetone e così via). Non sottoporre i connettori caricabatterie a sterilizzazione in autoclave.

Specifiche del connettore caricabatterie *SurePower II*

Dimensioni	22,7 cm (lunghezza) x 14,6 cm (profondità) x 8,6 cm (altezza)
Peso	0,8 kg
Tipo	IEC Classe I
Standard di progettazione	Conforme o superiore ai requisiti applicabili di UL 60601-1, EN 60601-1.
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a 50°C
Temperatura di conservazione/trasporto di breve durata	- 40°C a 70°C
Umidità	Da 30% a 93% di umidità relativa, senza condensa
Altitudine operativa	Da - 91 m a 6096 m (sotto e sopra il livello del mare) 1060 a 500 mBar
Protezione contro l'ingresso di particelle e acqua	IP X2