

## Istruzioni di montaggio

### Borsa di trasporto CRS-MOD per ZOLL X Series

Togliere i cappucci di copertura dell'impugnatura (sinistra e destra) con uno strumento appuntito e allentare le quattro viti per separare l'impugnatura dal dispositivo.

Nota: se si utilizza il set di occhielli «versione MCS», questo passaggio non è necessario.

# 1



Fissare gli occhielli sull'impugnatura e riavvitare l'impugnatura sul dispositivo.

☞ Assicurarsi che la cinghia dell'occhiello non sia schiacciata.

# 2



Montare la borsa all'unità.

Tirare la cinghia di fissaggio della borsa intorno al manico, farla passare attraverso l'apertura e fissarla sul nastro a strappo all'interno della borsa. (sinistra e destra)

# 3



## Istruzioni di montaggio

### Borsa di trasporto CRS-MOD per ZOLL X Series

Tagliare le fibbie di plastica sugli occhielli in similpelle della borsa e scartarle. (sinistra e destra)

☞ Fate attenzione a non danneggiare gli occhielli della borsa.

Anche la cinghia di collegamento (fettuccia nera) può essere gettata.

# 4




Infilare la nuova cinghia di collegamento (cinghia rossa in similpelle) sugli occhielli in similpelle della borsa.

Assicurarsi che l'orientamento sia corretto: Il pulsante deve essere sul lato della stampante e la parte superiore rivolta verso l'esterno della macchina.

☞ Per facilitare il montaggio, la staffa metallica destra può essere staccata dalla cinghia di collegamento.

# 5

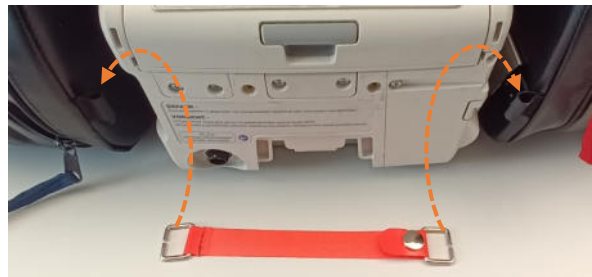

Infilare di nuovo la cinghia di collegamento e fissarla in posizione. (bottone a pressione).

Le staffe di metallo devono essere allineate in modo che l'apertura della staffa di metallo si trovi nell'occhiello di similpelle.

# 6



## Istruzioni di montaggio

### Borsa di trasporto CRS-MOD per ZOLL X Series

Posizionare i manicotti distanziatori sulle boccole filettate sul retro dell'unità (2x).

# 7



Posizionare la piastra di fissaggio e inserire la spina di alimentazione.

☞ Assicurarsi che i manicotti distanziatori non siano spostati o inclinati.

# 8



Posizionare la piastra di fissaggio e serrare le quattro viti con le rondelle.

☞ Importante: durante il montaggio, tirare la cinghia di collegamento il più a destra possibile e infine tirare l'estremità della cinghia di collegamento sopra la piastra di fissaggio in modo che ci sia spazio sufficiente per azionare il pulsante.

# 9

