

Istruzioni di montaggio

Borsa di trasporto ZOLL-MOD per ZOLL X Series

Togliere i cappucci di copertura sulla maniglia con uno strumento appuntito e allentare le quattro viti (sinistra e destra) per separare la maniglia dall'unità.

1



Fissare gli occhielli alla maniglia (sinistra e destra)

2



Avvitare la cinghia corta, che si trova sul retro della borsa destra, al supporto di fissaggio.

3



Istruzioni di montaggio

Borsa di trasporto ZOLL-MOD per ZOLL X Series

Attaccare gli occhielli delle borse di trasporto alla maniglia e riavvitare la maniglia sull'unità.

☞ Assicurarsi che la cinghia dell'occhiello non sia schiacciata.

Riattaccare i cappucci di copertura alla maniglia.

4



Posizionare i manicotti distanziatori sulle boccole filettate sul retro dell'unità (2x).

Allineare la staffa metallica della borsa sinistra in modo che il foro della staffa sia posizionato sopra la boccola filettata dell'unità.

5



Posizionare il supporto di fissaggio e inserire il connettore di alimentazione.

☞ Assicurarsi che i manicotti distanziatori non siano spostati o inclinati.

Posizionare la piastrina di ritenuta e serrare le quattro viti con le rondelle.

6

