















BeneVision N22/N19


Monitor paziente Guida di riferimento rapido


Simbolo	Funzione
 Menu principale	Consente di accedere al menu principale.
 Riprist. allarme	Consente di confermare gli allarmi in corso e di ripristinare il sistema di allarme.
 Pausa audio	Consente di mettere in pausa i suoni degli allarmi acustici.
 Riepilogo	Consente di accedere al menu Riepil.
 Dati del paziente	Consente di accedere al menu Gestione pazienti.
 Avvia/arr. NIBP	Consente di avviare una misurazione NIBP oppure di arrestare la misurazione NIBP corrente.
 STAT NIBP	Consente di avviare una misurazione NIBP continua da cinque minuti.
 Azz. IBP	Consente di avviare una calibrazione di azzeramento IBP.
 PAWP	Consente di accedere alla schermata PAWP.
 Venipuntura	Consente di aprire la finestra Venipuntura.

Simbolo	Funzione
 Altro	Consente di visualizzare altri tasti di scelta rapida.
 Allarme	Consente di accedere al menu All.
 Pausa allarme	Consente di mettere in pausa gli allarmi correnti.
 Standby	Consente di accedere alla modalità Standby.
 Impostazioni Schermo	Consente di accedere al menu Impost. schermo.
 Arresta tutto	Consente di arrestare tutte le misurazioni NIBP.
 Misura NIBP	Consente di accedere al menu Misura NIBP.
 Misura G.C.	Consente di aprire la finestra Misura G.C..
 Loop	Consente di aprire la finestra Loop.
 Avvia TOF	Consente di avviare/arrestare la misurazione TOF.

Monitor paziente BeneVision N22/N19 Guida di riferimento rapido

Simbolo	Funzione
 Imp. parametri	Consente di accedere al menu Imp. parametri .
 Evento man.	Consente di attivare un evento manualmente e salvarlo.
 OxyCRG	Consente di aprire la finestra OxyCRG .
 Modo privacy	Consente di accedere alla modalità privacy.
 Modo BCP	Consente di accedere alla modalità BCP.
 Volume	Consente di accedere al menu Volume .
 Calcoli	Consente di accedere al menu Calcoli .
 Stam.	Consente di avviare la stampa di un rapporto in tempo reale.
 Dimissione Paziente	Consente di accedere alla finestra di dialogo Dimissione Paz.
 Deriv ECG/guad	Consente di accedere al menu Deriv ECG/guad.
 BoA	Consente di accedere alla schermata BoA Dashboard .
 GCS	Consente di accedere al menu GCS .
 HemoSight	Consente di accedere al menu HemoSight .
 Pace View	Consente di aprire la finestra Pace View .

Simbolo	Funzione
 Vista remota	Consente di aprire la finestra Vista remota .
 Minitrend	Consente di accedere alla schermata Minitrend .
 ECG scher. intero	Consente di accedere al monitoraggio ECG a 12 derivazioni a schermo intero.
 Modalità notturna	Consente di accedere alla modalità notturna.
 Modalità intubazione	Consente di accedere alla modalità intubazione.
 Congelare	Consente di bloccare le forme d'onda.
 Carica config.	Consente di accedere al menu Carica config.
 Registrazione	Consente di avviare/ arrestare una registrazione.
 Ruota schermo	Consente di modificare l'orientamento dello schermo.
 Richiesta aiuto	Consente di inviare una richiesta di aiuto.
 EWS	Consente di accedere alla schermata EWS .
 SepsisSight	Consente di accedere al menu SepsisSight .
 Modalità soccorso	Consente di accedere alla Modalità soccorso .
 ECG 24h Sum	Consente di visualizzare il riepilogo ECG delle ultime 24 ore.

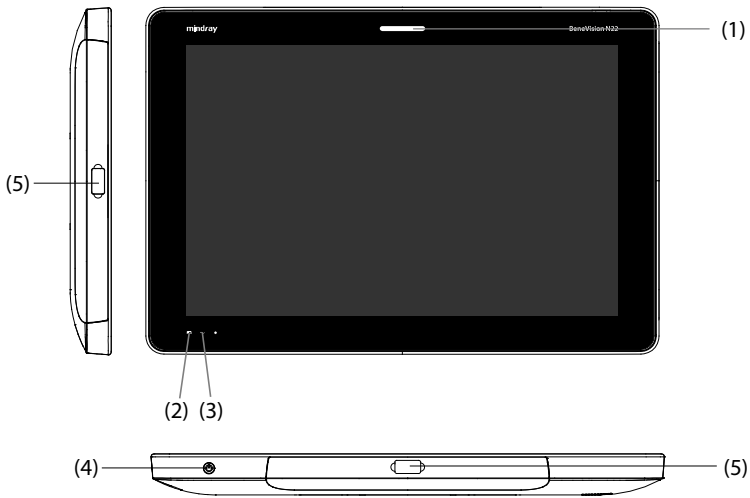

- (1) Spia di allarme (2) Indicatore batteria
(3) Indicatore alimentazione CA (4) Interruttore di alimentazione
(5) Connettori bus seriale

Accensione del monitor

Premere l'interruttore di alimentazione per accendere il monitor.

Display

Scelta dello schermo

1. Accedere a **Scegli scher** seguendo una delle procedure illustrate di seguito:
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Impost. schermo**.
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **Display**, selezionare **Scegli scher**.
2. Selezionare lo schermo desiderato.

Selezione della schermata a numeri grandi

1. Accedere a **Scegli scher** seguendo una delle procedure illustrate di seguito:
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Impost. schermo**.
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **Display**, selezionare **Scegli scher**.
2. Selezionare **Numeri grandi**.
3. Selezionare l'area di un valore numerico o di una forma d'onda, quindi selezionare l'elemento che si desidera visualizzare nell'area dall'elenco di scelta rapida.

Visualizzazione di parametri numerici e forme d'onda

1. Accedere a **Layout riq.** seguendo una delle procedure illustrate di seguito:
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Impost. schermo** → scheda **Layout riq.**.
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **Display**, selezionare **Layout riq.**.
2. Selezionare l'area di un valore numerico o di una forma d'onda, quindi selezionare l'elemento che si desidera visualizzare nell'area dall'elenco di scelta rapida. I parametri e le forme d'onda non selezionati non saranno visualizzati.

Impostazione dei tasti di scelta rapida

1. Impostare il tasto di scelta rapida seguendo una delle procedure illustrate di seguito:
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Impost. schermo** → selezionare la scheda **Seleziona tasti sc. rap.**.
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **Display**, selezionare **Tasti sc. rap.**.
2. Selezionare la scheda **Corrente** per configurare i tasti di scelta rapida che si desidera visualizzare sullo schermo: nella parte superiore di questa pagina, selezionare un blocco nel punto in cui si desidera visualizzare un determinato tasto di scelta rapida, quindi selezionare il tasto di scelta rapida dall'elenco.
3. Selezionare la scheda **Altro** per configurare i tasti di scelta rapida che si desidera visualizzare quando viene selezionato il tasto di scelta rapida **Altro**.

Monitoraggio ECG

Scelta del tipo di derivazione ECG

1. Selezionare l'area dei valori numerici o delle forme d'onda ECG per accedere al menu **ECG**.
2. Nella pagina **ECG**, selezionare la scheda **Impost.**
3. Impostare **Set derivazioni** in base al tipo di derivazione che si intende utilizzare.
L'impostazione predefinita è **Autom.**. In questo caso, il monitor rileva automaticamente il tipo di derivazione utilizzato.

Verifica dello stato di stimolazione

1. Selezionare l'area dei valori numerici o delle forme d'onda ECG per accedere al menu **ECG**.
2. Nella pagina **ECG**, selezionare la scheda **Stimol.**
3. Impostare **Pcmkr** su **Si** o **No**.

Attivazione del monitoraggio ST

1. Selezionare l'area dei valori numerici o delle forme d'onda ECG per accedere al menu **ECG**.
2. Selezionare la scheda **ST** → selezionare la scheda **Impost.**
3. Attivare **Analisi ST**.

Attivazione del monitoraggio dell'intervallo QT/QTc

1. Selezionare l'area dei valori numerici o delle forme d'onda ECG per accedere al menu **ECG**.
2. Selezionare la scheda **QT** → selezionare la scheda **Impost.**
3. Attivare **Analisi QT**.

Accesso alla schermata a 12 derivazioni

1. Selezionare l'area dei valori numerici o delle forme d'onda ECG per accedere al menu **ECG**.
2. Nella parte inferiore della pagina ECG, selezionare **12 Der.**

È possibile accedere alla schermata a 12 derivazioni seguendo una delle procedure illustrate di seguito:











- Selezionare il tasto di scelta rapida **Impost. schermo** → **ECG a 12 deriv.**
- Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **Display**, selezionare **Scegli scher** → selezionare **ECG a 12 deriv.**

Avvio dell'analisi ECG a riposo a 12 derivazioni

Per avviare l'analisi ECG a riposo a 12 derivazioni, selezionare **Analiz.** in basso a sinistra nella schermata a 12 derivazioni.

Monitoraggio NIBP

Avvio o arresto della misurazione NIBP

Attività	Con tasto di scelta rapida	Dal menu NIBP
Avvio di una misurazione manuale	Tasto di scelta rapida Avvia/arr. NIBP 	Pulsante Avvia NIBP
Avvio automatico di serie NIBP	Tasto di scelta rapida Avvia/arr. NIBP 	Scheda Impost. → impostare Intervallo → pulsante Avvia NIBP
	Tasto di scelta rapida Misura NIBP  → selezionare l'intervallo	
Avvia misurazione sequenza NIBP	Tasto di scelta rapida Misura NIBP  → Sequenza	Scheda Sequenza → impostare la sequenza NIBP → pulsante Avvia NIBP
Avvio misurazione STAT	Tasto di scelta rapida STAT NIBP 	Pulsante STAT
	Tasto di scelta rapida Misura NIBP  → STAT	
Arresto delle misurazioni NIBP correnti	Tasto di scelta rapida Avvia/arr. NIBP 	Pulsante Arresta NIBP
Conclusione automatica di serie NIBP o sequenza NIBP	Tasto di scelta rapida Arresta tutto 	Pulsante Arresta tutto
Arresto della misurazione STAT e conclusione delle serie	Tasto di scelta rapida Avvia/arr. NIBP 	Pulsante Arresta NIBP o Arresta tutto
	Tasto di scelta rapida STAT NIBP 	

Impostazione dell'intervallo NIBP

1. Selezionare l'area dei valori numerici **NIBP** per accedere al menu **NIBP**.
2. Selezionare la scheda **Impost.**.
3. Impostare **Intervallo**. Selezionando **Manuale**, si passa alla modalità manuale.

Monitoraggio IBP

Modifica dell'etichetta della pressione

L'etichetta della pressione è un identificatore univoco per ciascun tipo di pressione. È pertanto necessario selezionare l'etichetta della pressione adatta al tipo di pressione che si desidera monitorare.

Per selezionare l'etichetta della pressione, seguire questa procedura:

1. Selezionare un'area dei valori numerici o delle forma d'onda IBP per accedere al menu della pressione corrispondente.
2. Selezionare la scheda **Impost.**.
3. Selezionare l'etichetta desiderata.

Azzeramento del trasduttore IBP

1. Collegare il trasduttore IBP, il cavo adattatore IBP e il modulo.
2. Chiudere la valvola a tre vie (quella vicino al trasduttore) verso il paziente per sfiatare il trasduttore verso la pressione atmosferica.
3. Azzerare il trasduttore seguendo una delle procedure illustrate di seguito:
 - ◆ Premere il tasto **Azzer.** sul modulo.
 - ◆ Selezionare l'area dei valori numerici (ad esempio l'area dei valori numerici Art), quindi selezionare **Azzer.**
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Azz. IBP.**
4. Una volta conclusa la calibrazione dello zero, chiudere il rubinetto a maschio verso l'aria e aprire quello verso il paziente.

Gestione dei pazienti

Modifica delle informazioni paziente

1. Selezionare il tasto di scelta rapida **Dati anagrafici pazien.**.
2. Nel menu **Gestione pazienti**, modificare le informazioni paziente in base alle necessità.

Se al monitor è collegato un lettore di codici a barre, è possibile eseguire la scansione del codice a barre del paziente per immettere il numero della relativa cartella clinica.

Dimissione del paziente

Dimettere il paziente manualmente seguendo una delle procedure illustrate di seguito:

- Selezionare il tasto di scelta rapida **Dimissione Paz.**
- Selezionare il tasto di scelta rapida **Dati anagrafici pazien.** → selezionare **Dimissione Paz.**
- Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **Gestione pazienti**, selezionare **Dimetti.**

Allarmi

Simboli degli stati di allarme

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Tutti gli allarmi sono in pausa.		I segnali acustici sono in pausa.
	I segnali acustici sono disattivati.		Gli allarmi sono stati rilevati e il sistema di allarme viene ripristinato.
	I singoli allarmi fisiologici sono disattivati o il sistema si trova nello stato di disattivazione allarmi.		

Impostazione delle proprietà di allarme dei parametri

1. Accedere alla pagina **Limiti** seguendo una delle procedure illustrate di seguito:
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **All.**
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **All.** selezionare **Limiti.**
2. Selezionare la scheda di un parametro e impostare attivazione allarme, limiti, priorità, ecc.

Modifica delle impostazioni di allarme aritmia

1. Selezionare l'area dei valori numerici o delle forme d'onda ECG per accedere al menu **ECG.**
2. Selezionare la scheda **Aritmia** → selezionare la scheda **All.**
3. Impostare le proprietà di allarme.

Attivazione dei limiti di allarme automatici

1. Accedere alla pagina **Limiti** seguendo una delle procedure illustrate di seguito:
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **All.** → selezionare la scheda **Limiti.**
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **All.** selezionare **Limiti.**
2. Nella pagina **Limiti**, selezionare **Limiti autom.** in basso a sinistra.

Messa in pausa degli allarmi/dei segnali acustici

1. Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → passare alla terza pagina → nella colonna **Sistema**, selezionare **Manutenzione** → inserire la password richiesta → selezionare **Ok**.
2. Selezionare la scheda **All.** → selezionare la scheda **Pausa/Reimp.**
3. Impostare **Pausa** su **Pausa Allarme** o **Pausa audio**.

Ripristino degli allarmi

Premere **Riprist. allarme** per rilevare gli allarmi in corso e ripristinare il sistema di allarme.

Accesso alla guida in caso di allarme tecnico

Nell'elenco degli allarmi tecnici, i messaggi di allarme seguiti dall'indicazione **Dettaglio** includono delle informazioni della guida.

1. Selezionare l'area delle informazioni degli allarmi tecnici per accedere alla finestra **All.**
2. Selezionare la scheda **Allarmi Tecnici**.
3. Selezionare l'allarme desiderato.

Accesso alla modalità notturna

1. Selezionare il tasto di scelta rapida **Mod. notturna** oppure selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **Display**, selezionare **Mod. notturna**.
2. Modificare le impostazioni della modalità notturna, se necessario.
3. Selezionare **Attiva modalità notte**.

Accesso a modalità privacy

Scegliere una delle procedure illustrate di seguito per accedere alla modalità privacy:

- Selezionare il tasto di scelta rapida **Modo Privacy** → selezionare **Ok**.
- Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **Display**, selezionare **Modo Privacy** → selezionare **Ok**.

Configurazione del monitor

Regolazione volume

Selezionare il tasto di scelta rapida **Volume** per impostare **Volume allarme**, **Volume QRS** e **Volume tasti**.

Regolazione della luminosità dello schermo

1. Accedere a Display seguendo una delle procedure illustrate di seguito:
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Impost. schermo** → selezionare la scheda **Display**.
 - ◆ Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **Display**, selezionare **Display**.
2. Nel blocco **Schermo princip.**, definire l'impostazione dell'opzione **Luminosità** per il display principale.
3. Nel blocco **Schermo secondario**, definire l'impostazione dell'opzione **Luminosità** per il display secondario.

Riepilogo dei trend

Per riesaminare i trend, accedere alla finestra **Riepil.** seguendo una delle procedure illustrate di seguito:

- Selezionare il tasto di scelta rapida **Riepil.**
- Selezionare il tasto di scelta rapida **Menu Princ.** → nella colonna **Riepil.**, selezionare un'opzione.

Visualizzazione di altri letti

Per visualizzare altri letti, accedere alla finestra **Vista remota** seguendo una delle procedure illustrate di seguito:

- Selezionare il tasto di scelta rapida **Vista remota**.
- Selezionare il tasto di scelta rapida **Impost. schermo** → selezionare la scheda **Schermo princip.** o **Schermo secondario** → selezionare la scheda **Scegli scher** → selezionare **Vista remota**.
- Selezionare il letto nel riquadro di osservazione degli allarmi sulla schermata principale, se configurato.



046-007977-00 (2.0)