

Serie VS 9/8

Monitor parametri vitali Guida di riferimento rapido

Nota: la guida di riferimento rapido non sostituisce il Manuale dell'operatore. Prima di utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente il Manuale dell'operatore e seguire le istruzioni per garantire la sicurezza dell'operatore, del paziente e dell'apparecchiatura.




Panoramica









- 1 Connettore del bracciale NIBP
- 2 Connettore cavo SpO₂
- 3 Uscita CO₂
- 4 Connettore della linea di campionamento della CO₂
- 5 Interruttore di alimentazione



- 6 Tasto Riprist./Pausa allarme
- 7 Tasto di avvio/arresto NIBP
- 8 Tasto ammissione paziente
- 9 Manopola

Tasti di scelta rapida

Simbolo	Funzione
 Riepilogo	Consente di accedere al menu Riepil.
 Salva	Consente di salvare le informazioni immesse.
 Menu principale	Consente di accedere al menu principale.

Simbolo	Funzione
 Paziente	Mostra l'elenco dei pazienti.
 Cancella	Consente di cancellare tutte le informazioni immesse.
 Altro	Consente di visualizzare altri tasti di scelta rapida.

Simbolo	Funzione
 Successivo	Mostra la schermata successiva. (È anche possibile scorrere verso l'alto sulla schermata principale per visualizzare la schermata successiva).
 Pausa allarme	Consente di mettere in pausa gli allarmi fisiologici.
 Obiettivo mirato	Consente di accedere alla schermata Obiettivo mirato .

Simbolo	Funzione
 Indietro	Mostra la schermata precedente. (È anche possibile scorrere verso il basso sulla schermata principale per visualizzare la schermata precedente).
 Ripristino allarme	Consente di ripristinare il sistema di allarme.

Accensione del monitor


Premere l'interruttore di alimentazione per accendere il monitor.

Selezione di un flusso di lavoro

Selezionare  nell'angolo superiore sinistro della schermata per selezionare un flusso di lavoro.


- Selezionare un flusso di lavoro in **Controllo saltuario** per utilizzare il monitor in modalità **Controllo saltuario**.
- Selezionare un flusso di lavoro in **Monitoraggio continuo** per utilizzare il monitor in modalità di **Monitoraggio continuo**.

Accesso come medico

1. Selezionare il pulsante  nell'angolo superiore destro del menu.
2. Immettere **Medico** e la **password (se richiesta)**.
3. Selezionare **Login**.



Se al monitor è collegato un lettore di codici a barre, è possibile eseguire la scansione del proprio codice a barre o scheda RFID per immettere i dati di accesso.

Ammissione di un paziente



1. Selezionare il tasto di scelta rapida .
2. Dall'**Elenco paz locale** o dal **Database ADT**, selezionare un paziente, quindi selezionare **Ammetti**.
3. Modificare le informazioni paziente in base alle necessità. Selezionare **OK**.

Se al monitor è collegato un lettore di codici a barre, è possibile eseguire la scansione del codice a barre del paziente per immettere il numero della relativa cartella clinica.




Misurazione NIBP

- Selezionare  per impostare la posizione del paziente e il sito di misurazione.
- Selezionare  per avviare la misurazione.
- In modalità **Monitoraggio continuo**, selezionare l'area NIBP per accedere al menu NIBP.
- Se nella parte inferiore dell'area NIBP viene visualizzato ..., scorrere da sinistra a destra per visualizzare un'altra schermata.

Misurazione della temperatura



- P/M: P sta per modalità **predittiva** e M sta per modalità di **monitoraggio** (SmarTemp).
-  : indica il sito di misurazione corrente.
-  : selezionarlo per immettere manualmente un valore di temperatura misurato.

Immissione manuale del valore RR


1. Selezionare  o  nell'area Resp. Si avvia un timer.
2. Contare il numero totale di respirazioni del paziente nell'ultimo minuto.
3. Immettere il numero e selezionare .



Immissione di parametri manuali

Selezionare un parametro nell'elenco e immettere le informazioni come descritto di seguito:

-  : selezionarlo per immettere un valore.
-  : selezionarlo per visualizzare le opzioni.






Salvataggio dei dati

1. Selezionare il tasto di scelta rapida  per salvare i dati fisiologici del paziente corrente.
2. Verificare che i dati necessari siano misurati o inseriti correttamente. Selezionare **OK**


Nota: per visualizzare il tasto di scelta rapida , potrebbe essere necessario scorrere verso l'alto sulla schermata principale o selezionare il tasto di scelta rapida .

Allarmi

Simboli degli stati di allarme

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Tutti gli allarmi sono in pausa.		I segnali acustici sono in pausa.
	I segnali acustici sono disattivati.		Gli allarmi sono stati rilevati e il sistema di allarme viene ripristinato.
	I singoli allarmi fisiologici sono disattivati o il sistema si trova nello stato di disattivazione allarmi.		

Messa in pausa degli allarmi/dei segnali acustici

- Selezionare il tasto di scelta rapida  per mettere in pausa o riprendere gli allarmi o l'audio degli allarmi.
- Per la serie VS 8, è anche possibile tenere premuto il tasto **Riprist./Pausa allarme** per mettere in pausa o riprendere gli allarmi o l'audio degli allarmi.

Ripristino degli allarmi

Selezionare il tasto di scelta rapida  per rilevare gli allarmi in corso e ripristinare il sistema di allarme.

Riepilogo dei trend

Selezionare il tasto di scelta rapida  per rivedere trend, punteggi ed eventi.

