

Monitor dei segni vitali VS-900

Guida rapida



Conformità ai requisiti della direttiva 93/42/EEC del Consiglio



Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europa) Eiffestraße 80, 20537 Amburgo, Germania

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen 518057 P.R. China

Sito Web: www.mindray.com

Tel.: +86 755 81888998

Fax: +86 755 26582680



046-004953-00(1.0)

Il Monitor è destinato al monitoraggio di parametri fisiologici quali SpO₂, FP, NIBP e TEMP, su pazienti adulti, pediatrici e neonatali presso strutture sanitarie da parte di medici qualificati o personale sanitario specializzato sotto la supervisione di un medico.

AVVERTENZA:

L'apparecchiatura deve essere collegata a una presa di corrente correttamente installata e dotata di contatti di messa a terra. Se l'impianto non prevede un conduttore di massa come protezione, scollegare l'attrezzatura dall'alimentazione e farla funzionare a batterie, ove possibile.






© 2013 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.
Il contenuto di questa guida è soggetto a modifica senza preavviso.

mindray

Guida rapida del monitor dei segni vitali VS-900


Questa è una guida rapida. Per maggiori dettagli, fare riferimento al Manuale dell'operatore di VS-900 (PN: 046-004886-00).

Tasti e funzioni



	<p>Interruttore on/off</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere questo tasto per accendere il monitor. ■ Premere questo tasto per accedere/uscire dalla modalità standby. ■ Quando il monitor è acceso, tenere premuto questo tasto per più di 2 secondi per spegnerlo.
	<p>Tasto Silenziamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere questo tasto per disattivare l'audio degli allarmi in corso. ■ Tenere premuto questo tasto per più di 2 secondi per mettere in pausa o ripristinare gli allarmi.
	<p>Tasto avvia/arresta NIBP</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere per avviare o interrompere le misurazioni NIBP.
	<p>Tasto Ammissione paziente</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Premere questo tasto per ammettere un nuovo paziente. ■ Premere questo tasto per tornare alla schermata principale.
	<p>Manopola</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ruotare la manopola in senso orario o antiorario per spostare il cursore. ■ Premere la manopola per selezionare una voce, ad esempio per accedere a un menu o per confermare una selezione.

Interfacce e menu

Connettori laterali e registratori

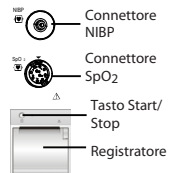

Vista posteriore

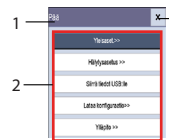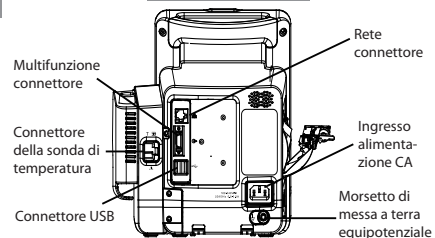

- I menu del presente monitor sono di norma composti da:
1. Intestazione: fornisce un titolo al menu in questione.
 2. Corpo principale: visualizza opzioni, pulsanti, messaggi di informazioni rapide, ecc. Un pulsante del menu seguito da ">>" indica la presenza di un sottomenu per quella voce.
 3. Tasto Esci: chiude il menu in questione e salva le impostazioni.

Modi operativi

- Modalità di monitoraggio: al momento dell'accensione, il monitor entra automaticamente nella modalità di monitoraggio. La modalità di monitoraggio è una modalità comune per il monitoraggio dei segni vitali del paziente.
- Modalità di monitoraggio: intermittente la modalità di monitoraggio intermittente è indicata per la misurazione di una zona in un breve arco di tempo. Quando la modalità di monitoraggio intermittente è impostata su ON, nella parte superiore della schermata verrà visualizzato **[Monit inter]** nell'area dei messaggi.
Per accedere alla modalità di monitoraggio intermittente, selezionare **[Principale]** → **[Manutenzione >>]** → **[Impostazioni utente >>]** → Digitare la password richiesta → Impostare **[Monit inter]** su **[ON]**.
- Modalità: standby in modalità standby, il monitoraggio del paziente corrente è concluso, ma il monitor continua ad essere alimentato.
Per accedere alla modalità standby, premere il pulsante di alimentazione. Viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Selezionare **[SI]** per accedere alla modalità standby.
- Modalità Demo: la modalità Demo è protetta da password e ha uno scopo puramente dimostrativo.
Per accedere alla modalità Demo, selezionare **[Principale]** → **[Manutenzione >>]** → **[Demo >>]** → Digitare la password richiesta → Selezionare **[OK]**.