
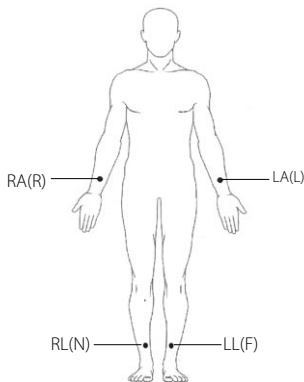


Elettrocardiografo BeneHeart R12/BeneHeart R12A

Guida rapida

Sistemazione degli elettrodi

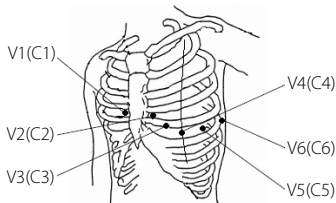

Preparazione del paziente

1. Preparare la cute nei punti di collegamento degli elettrodi nel seguente modo:
 - a. Esporre i punti di collegamento degli elettrodi.
 - b. Depilare tutti i punti di applicazione degli elettrodi.
 - c. Pulire tutti i punti di applicazione degli elettrodi con alcol e strofinare leggermente con una garza asciutta per rimuovere le cellule cutanee morte. Asciugare completamente la cute.
2. Applicare gli elettrodi nel seguente modo:
 - a. Collegare le 6 derivazioni per il torace e le 4 derivazioni per gli arti agli elettrodi.
 - b. Se si impiegano elettrodi riutilizzabili, applicare un sottile strato di gel conduttivo nel punto di collegamento di ogni elettrodo e su ogni elettrodo metallico.
 - c. Posizionare l'elettrodo come indicato a sinistra.

Nota: durante l'acquisizione di un ECG pediatrico, è possibile utilizzare un'alternativa al posizionamento standard V3 (C3). Applicare l'elettrodo nella posizione V4R (C4R). Questa si trova dall'altra parte dello sterno rispetto a V4 (C4).

AHA	IEC	Sistemazione degli elettrodi
V1	C1	Quarto spazio intercostale, sul margine destro dello sterno
V2	C2	Quarto spazio intercostale, sul margine sinistro dello sterno
V3	C3	A metà strada fra le posizioni degli elettrodi V2 (C2) e V4 (C4)
V4	C4	Quinto spazio intercostale, sulla linea emiclavare sinistra
V5	C5	Linea ascellare anteriore sinistra, orizzontalmente rispetto all'elettrodo V4 (C4)
V6	C6	Linea medioascellare sinistra, orizzontalmente rispetto all'elettrodo V4 (C4)
RA	R	Sopra il polso destro
LA	L	Sopra il polso sinistro
RL	N	Sopra la caviglia destra
LL	F	Sopra la caviglia sinistra

Precauzioni

- Questo prodotto non è progettato per l'uso con apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza.
- Nel caso di pazienti con pacemaker, se più condizioni avverse sono presenti contemporaneamente, l'apparecchio può scambiare il battito stimolato per un complesso QRS. Tenere sempre il paziente sotto stretta osservazione.
- Gli elettrodi riutilizzabili devono essere puliti dopo ogni utilizzo.
- Quando si posizionano gli elettrodi per il torace, assicurarsi che gli elettrodi metallici non si tocchino tra loro e che il gel applicato in un punto di collegamento non tocchi quello di un altro punto di collegamento.

Operazioni base


Collegamento del cavo del paziente

Collegare il cavo del paziente al connettore del cavo paziente sul lato destro dell'apparecchio. Stringere le viti in modo da assicurare saldamente il cavo del paziente all'apparecchio.

Accensione dell'apparecchio


Premere il tasto  per azionare il dispositivo.

Setup sistema

Premere il tasto  per accedere al menu principale. Impostare le opzioni come desiderato.


Inserimento dati del paziente

Prima di acquisire una misurazione ECG, inserire le informazioni del paziente in uno dei seguenti modi:

- Leggere l'ID del paziente con un lettore di codice a barre.
- Premere il tasto  per accedere al menu **[Info paziente]**.
Inserire manualmente le informazioni del paziente nella scheda **[Nuovo paziente]**.
- Selezionare un paziente nella scheda **[Elenco paz.]**.

Dopo aver inserito le informazioni del paziente, premere il tasto funzione **[Salva]**.

Acquisizione di report ECG

- Premere il pulsante  per avviare la misurazione automatica.
- Premere il tasto funzione **[Manuale]** per avviare una misurazione manuale.
- Premere il tasto funzione **[Ritmi]** per avviare una misurazione ritmi.

Per interrompere manualmente la registrazione, premere il tasto funzione **[Stop]**.

Gestione archivi paziente

Nella schermata normale, premere il tasto funzione **[Directory]** per accedere all'Elenco directory.

- Selezionare il paziente per rivedere, stampare o eliminare i report paziente o per inviarli a un dispositivo esterno.
- Premere **[Cerca]** e inserire una parola chiave per cercare i pazienti.



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestraße 80, 20537 Amburgo, Germania

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057 R.P. Cinese
Tel: +86 755 81888998
Fax: +86 755 26582680
www.mindray.com



046-004853-00(1.0)