


Guida di riferimento rapido della pompa a siringa


Blocco del touchscreen


Per bloccare il touchscreen, scorrere sul touchscreen dall'alto verso il basso e selezionare .

Sblocco del touchscreen

Per sbloccare il touchscreen, selezionare un punto qualsiasi dello schermo e scorrere il dispositivo di scorrimento come indicato.

Caricamento della siringa

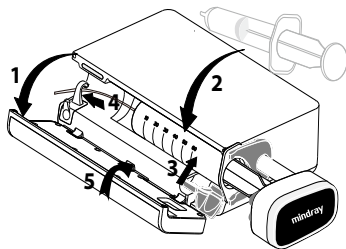




1. Premere l'interruttore di alimentazione  per accendere la pompa.
2. Aprire lo sportello (1) e tirare verso il basso il morsetto della siringa.
3. Posizionare la siringa nell'apposito alloggiamento (2), assicurandosi che la flangia della camera si trovi nello spazio tra la pompa e il morsetto della flangia della siringa.
4. Sollevare il morsetto della siringa fino a bloccarla contro la camera della siringa (3).
5. Posizionare la linea di prolunga nel gancio del set di prolunga (4).

AVVISO: controllare che la siringa e la linea di prolunga siano collegati saldamente e che non vi siano perdite.

Esecuzione dell'infusione

Dopo aver caricato una siringa, eseguire l'infusione attenendosi alle istruzioni riportate di seguito:

1. Selezionare la marca della siringa e impostare i parametri di infusione. Selezionare il farmaco, se necessario.
2. Spurgare la linea di infusione e collegare la linea di prolunga al paziente.
3. Selezionare  per avviare l'infusione.
4. Selezionare  per interrompere l'infusione.
5. Scaricare la siringa. Premere l'interruttore di alimentazione  per spegnere la pompa.


AVVISO: verificare che la marca della siringa sia selezionata correttamente prima di iniziare l'infusione.

Impostazione della pompa


Per impostare la pompa, scorrere sul touchscreen dall'alto verso il basso e selezionare **Menu**.

- ◆ Selezionare **Opz generale** per impostare la soglia della pressione di occlusione, ecc.
- ◆ Selezionare **Opz sistema** per impostare il volume dell'allarme, la luminosità dello schermo, ecc.

Simboli degli stati di allarme



: I segnali acustici sono in pausa.

: Gli allarmi sono stati confermati e l'allarme è stato ripristinato.

: Gli allarmi sono stati confermati e viene emesso il segnale acustico di promemoria.

Messa in pausa dei segnali acustici di allarme

Per mettere in pausa i segnali acustici, scegliere una delle procedure illustrate di seguito:

- ◆ Selezionare  nella schermata di allarme.
- ◆ Scorrere sul touchscreen dall'alto verso il basso e selezionare .

Ripristino degli allarmi

Quando si verifica un allarme, premere  per confermare e ripristinare l'allarme.

Risoluzione degli allarmi

Allarme	Soluzione
Occlusione	<ul style="list-style-type: none">◆ Controllare che il tubo non sia piegato o danneggiato.◆ Controllare l'impostazione della soglia di pressione. Aumentare la soglia se necessario.
Siringa non agganciata	Ricaricare la siringa.
Errore pinze	<ul style="list-style-type: none">◆ Controllare che le pinze del pistone non siano bloccate.◆ Aprire o chiudere manualmente le pinze del pistone.◆ Se l'allarme persiste, contattare il personale di assistenza.
Linea estensione scolleg	Controllare e ricollegare il set estensione.

AVVISO: Quando si verifica un allarme, controllare lo stato della pompa e gestire l'allarme il prima possibile. Se gli allarmi non sono conformi alla situazione effettiva, contattare il personale di assistenza. Per le soluzioni di altri allarmi, vedere il manuale dell'operatore.



046-019869-00(2.0)