


## Guida di riferimento rapido della pompa di infusione


### Blocco del touchscreen



Per bloccare il touchscreen, scorrere sul touchscreen dall'alto verso il basso e selezionare .

### Sblocco del touchscreen

Per sbloccare il touchscreen, selezionare un punto qualsiasi dello schermo e scorrere il dispositivo di scorrimento come indicato.

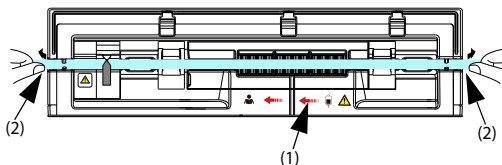


### Caricamento di un set di infusione



1. Premere l'interruttore di alimentazione  per accendere la pompa.
2. Premere  per aprire lo sportello della pompa.
3. Per evitare allentamenti, inserire la linea di infusione nello slot, seguendo l'indicatore di direzione del flusso (1). Assicurarsi che il set per infusione sia disposto in linea retta e inserito saldamente nelle scanalature del canale del tubo (2) su entrambi i lati dell'involucro.
4. Chiudere lo sportello della pompa.

### Esecuzione dell'infusione

Dopo aver caricato un set per infusione, eseguire l'infusione attenendosi alle istruzioni riportate di seguito:

1. Selezionare la marca del set per infusione e impostare i parametri per l'infusione. Selezionare il farmaco, se necessario.
2. Spurgare la linea di infusione e collegare il set per infusione al paziente.
3. Selezionare  per avviare l'infusione.
4. Selezionare  per interrompere l'infusione.
5. Scaricare il set per infusione. Premere l'interruttore di alimentazione  per spegnere la pompa.

**AVVISO: verificare che la marca del set per infusione sia selezionata correttamente prima di iniziare l'infusione.**


### Impostazione della pompa


Per impostare la pompa, scorrere sul touchscreen dall'alto verso il basso e selezionare **Menu**.

- ◆ Selezionare **Opz generale** per impostare la soglia della pressione di occlusione, ecc.
- ◆ Selezionare **Opz sistema** per impostare il volume dell'allarme, la luminosità dello schermo, ecc.

### Simboli degli stati di allarme



: I segnali acustici sono in pausa.

: Gli allarmi sono stati confermati e l'allarme è stato ripristinato.

: Gli allarmi sono stati confermati e viene emesso il segnale acustico di promemoria.

### Messa in pausa dei segnali acustici di allarme

Per mettere in pausa i segnali acustici, scegliere una delle procedure illustrate di seguito:

- ◆ Selezionare  nella schermata di allarme.
- ◆ Scorrere sul touchscreen dall'alto verso il basso e selezionare .

### Ripristino degli allarmi

Quando si verifica un allarme, premere  per confermare e ripristinare l'allarme.

### Risoluzione degli allarmi

Allarme	Soluzione
<b>Aria in linea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Scollegare il paziente dalla pompa e spurgare la linea.</li> <li>◆ Controllare che l'impostazione del limite della singola bolla sia corretta.</li> </ul>
<b>Aria accumulata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Scollegare il paziente dalla pompa e spurgare la linea.</li> <li>◆ Verificare che l'impostazione del limite delle bolle d'aria accumulate sia corretta.</li> </ul>
<b>Errore gocce</b>	Controllare che il sensore gocce sia collegato correttamente o sostituirlo.
<b>Occlusione a monte</b>	Verificare l'assenza di occlusioni nel set per infusione.
<b>Occlusione a valle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verificare l'assenza di occlusioni nel set per infusione.</li> <li>◆ Controllare che l'impostazione del limite di pressione sia corretta.</li> </ul>
<b>Set infusione scoll</b>	Chiudere il morsetto rullo e ricaricare il set per infusione.
<b>Errore set infusione</b>	Chiudere il morsetto rullo e ricaricare il set per infusione.

**AVVISO:** Quando si verifica un allarme, controllare lo stato della pompa e gestire l'allarme il prima possibile. Se gli allarmi non sono conformi alla situazione effettiva, contattare il personale di assistenza. Per le soluzioni di altri allarmi, vedere il manuale dell'operatore.



046-019853-00(2.0)