




BRAVDEN

Advanced CPR

Conforme alle linee guida ERC e AHA 2021

Il primo modello che ti aiuta a visualizzare gli effetti della RCP

CREA FIDUCIA • PROMUOVE LA COMPRENSIONE • FISSA LE COMPETENZE

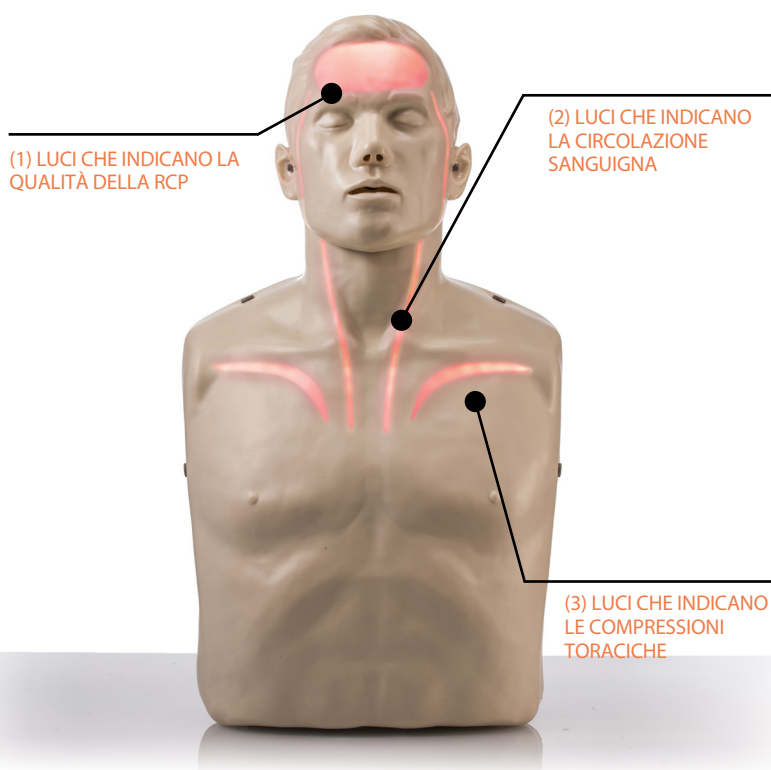

1. INDICATORI LUMINOSI DI QUALITÀ CPR:

si accendono per indicare che il sangue sta raggiungendo il cervello. Si accendono solo quando la profondità e la frequenza delle compressioni toraciche vengono eseguite correttamente sulla base delle linee guida scelte.

2. LUCI CHE INDICANO LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA:

si accendono per rappresentare il flusso sanguigno dal cuore al cervello. La velocità del flusso sanguigno mostrato varia con la profondità e la velocità delle compressioni. Lampeggiano per indicare un ritmo tra 100 e 120 al minuto e rimarranno attivi se la frequenza supera 120 compressioni al minuto.

3. LUCI CHE INDICANO LA COMPRESIONE TORACICA:

queste luci rappresentano il volume di sangue messo in circolo dalle compressioni toraciche. In modalità AHA per impostazione predefinita, vengono attivati quando la profondità di compressione è di almeno 5 cm (1). In modalità ERC, vengono attivati quando la profondità di compressione è di almeno 5 cm ma non superiore a 6 cm (2).

RILASCIO INCOMPLETO DEL TORACE:

Se il ritorno del torace tra le compressioni è insufficiente, la luce sulla fronte, che indica la buona qualità della RCP, non si accende.

“Il manichino per la formazione all’ RCP Brayden è un nuovo strumento che aiuta a migliorare la comprensione degli effetti della rianimazione cardiopolmonare e facilita la valutazione della qualità delle compressioni toraciche”.

Dott. Pascal Cassan

LA FAMIGLIA BRAYDEN

BRAYDEN PRO ora con l'app online Brayden per iOS

La soluzione di addestramento più completa alla RCP quando sono richiesti risultati numerici. Brayden Pro fornisce risultati in tempo reale dei parametri della RCP, nonché un'analisi a posteriori della qualità della RCP. Esiste un collegamento Bluetooth tra il manichino e l'applicazione da utilizzare su un tablet Android e / o un iPad o iPhone Apple.

- ✓ Visualizzazione facile e intuitiva della qualità della RCP in tempo reale
- ✓ Progettato con l'aiuto di esperti europei

“La capacità di Brayden Pro di fornire un feedback immediato sulla qualità della RCP migliorerà notevolmente la competenza dei soccorritori durante la RCP”

Dr Carl Gwinnutt



BRAYDEN Junior

KIT DI CONVERSIONE

È necessario un solo manichino per l'addestramento CPR per adulto e pediatrico. È possibile utilizzare il kit di conversione su un manichino adulto per trasformarlo in un manichino bambino.

- ✓ Trasforma facilmente un manichino Brayden adulto in un manichino Brayden Junior
- ✓ Ha le caratteristiche fisiche di un bambino dai 10 ai 12 anni
- ✓ Meno spazio di archiviazione e meno peso per il trasporto
- ✓ Più economico - Semplice e pratico



BRAYDEN Baby

Brayden Baby è il primo modello per bambini a fornire un feedback visivo, in tempo reale, attraverso l'uso delle luci, sulla buona qualità delle compressioni e delle ventilazioni toraciche.

- ✓ Anatomicamente corretto con sollevamento del torace realistico e sublussazione della mascella
- ✓ Progettato con l'aiuto di esperti europei
- ✓ Ideale per insegnare la rianimazione di neonati e bambini

“Penso che il manichino Brayden Baby sia il miglior manichino esistente oggi per insegnare la rianimazione di base”

Kevin Mackie



Al vostro servizio

