

C Serie Trainer

C1A & C2

Allgemeine Funktionen Mindray Trainer C Serie

Wenn Sie den Deckel öffnen, werden die beiden Trainer aktiviert und geben klare Anweisungen an den Benutzer. Der C1A macht dies durch Sprachansagen, während der C2 die zu erledigende Schritte zusätzlich auf dem Display visuell darstellt.

Auf den Mindray Trainern sind bis zu 24* verschiedene Sprachen abgespeichert. Diese sind über die Sprachwechseltaste anzuwählen.

Zusätzlich verfügen beide AEDs über eine Kindertaste (bis 8 Jahre oder 25kg).

*Die Sprachen sind:

Deutsch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Russisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Ungarisch, Norwegisch, Schwedisch, Rumänisch, Griechisch, Kroatisch, Bulgarisch, Hebräisch, Portugiesisch, Litauisch, Estländisch, Isländisch, Lettisch, Englisch, Französisch

Lieferumfang C1A & C2 Trainer



- Trainertasche
- C1A oder C2 Trainer inkl. 8x AA-Batterien
- Elektroden
- Elektrodenkabel
- Bedienungshandbuch
- Fernbedienung inkl. 2x AAA-Batterien

C Serie Trainer

C1A & C2

Funktion Mindray C1A & C2



- 1 – Durch das Öffnen des Deckels wird der AED aktiviert
- 2 – Trainingselektroden-Anschluss
- 3 – C1A - Piktogramm für CPR / C2 - mit Display und Batteriestatus
- 4 – Schocktaste
- 5 – Schalter für Kinderbetrieb
- 6 – Lautsprecher
- 7 – Sprachtaste
- 8 – Statusanzeige

C Serie Trainer

C1A & C2

Funktion Fernbedienung

Der Auszubildende kann die verschiedenen Szenarien ebenfalls über die Fernbedienung steuern. Sobald der Auszubildende die Elektroden befestigt hat, stehen dem Kursleiter folgende Optionen zur Verfügung:

- Sprache wechseln
- Tasten für sechs Basisszenarien*
- Pausieren / Fortsetzen
- Schockabgabe empfohlen
- Keine Schockabgabe empfohlen
- Automatische Schockabgabe in 3.2.1.
- Kleidung von der Brust des Patienten entfernen. Elektroden wie auf den Elektroden abgebildet anbringen
- Den Patienten nicht berühren, Herzrhythmus wird analysiert
- Halbautomatische Schockabgabe
- Lautstärke anpassen



- * 1. Schockbarer Rhythmus – Defibrillation gelingt mit einem Schock
- 2. Schockbarer Rhythmus – Defibrillation gelingt mit zwei Schocks
- 3. Schockbarer Rhythmus – Defibrillation gelingt mit drei Schocks
- 4. Schockbarer Rhythmus – Defibrillation gelingt mit einem Schock, danach normaler Rhythmus
- 5. Schockbarer Rhythmus – Schockbarer Rhythmus während des gesamten Kurses
- 6. Normaler Rhythmus – Kein Schock während der gesamten Reanimation

Batteriewechsel

Bei den Trainer gibt es auf der Rückseite das Batteriefach. Beim C2 gibt es eine Batterieanzeige, beim C1A nicht. Wenn die Batterien leer sind, kann der Schlitten aufgestossen werden und die acht AA Batterien dürfen ersetzt werden.



Bei der Fernbedienung sind es zwei AAA Batterien. Hier funktioniert es mit dem gleichen Schlittenprinzip.

