

Wartung und Unterhalt

Mindray Beneheart L-Serie

Kontrolle Gerätestatus

Die Mindray Beneheart L-Serie führt auf täglicher Basis automatische Selbsttests durch. Zusätzliche Wartungsarbeiten sind keine erforderlich. Um sicher zu gehen, dass der Defibrillator jederzeit einsatzbereit ist, empfiehlt der Hersteller folgende Punkte wöchentlich zu überprüfen.

(Das Gerät muss dazu nicht eingeschaltet werden):




1. Gerätestatus via Statuslicht prüfen

(Blinkt alle 5 Sekunde kurz auf)



= **Gerät einsatzbereit**

Gerät, Batterie & Elektroden OK

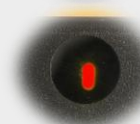

= **Gerät nicht einsatzbereit**

«Gerät einschalten und die Anweisungen des Gerätes befolgen»

2. Überprüfen Sie das Verfallsdatum der Elektroden

Durch das durchsichtige Fenster auf der Abdeckung

3. Alarm des Wandkastens überprüfen

(Sofern vorhanden)

Batterie- und Elektrodenwechsel

Bei Nichtgebrauch des Defibrillators beträgt die Lebensdauer von Elektroden und Batterie rund 5 Jahre. Wenn die Batterie einen niedrigen Ladezustand erreicht, werden entsprechende Sprachanweisungen ausgegeben.

Anleitung Batterie- und Elektrodenwechsel

1. Alte Elektrode durch Ziehen am Steckerkabel ausstecken und neue Elektrode anschliessen. (Abb. 1)
2. Elektrodenpackung und HLW-Sensor-Packung vorsichtig in die Halter im Deckel einlegen. Das Verfallsdatum der Elektrode muss im Fenster sichtbar sein. Elektrodenkabel in die Halter im Deckel verlegen. (Abb. 2)
3. Batteriefachabdeckung wie dargestellt entfernen. (Abb. 3)
4. Die Batterie nach links schieben und aus dem Batteriefach nehmen. (Abb. 4)
Neue Batterie ausrichten und in das Batteriefach ganz an die rechte Seite schieben.
5. Nach dem Einsetzen der Batterie beginnt das Gerät mit einem Selbsttest. Den Anweisungen des Geräts folgen.
6. Nach dem Selbsttest den Deckel schliessen und prüfen, dass die Statusanzeige grün leuchtet.

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

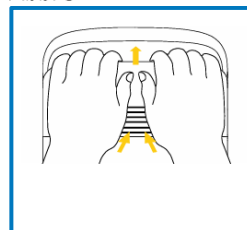


Abb. 4

