

Wartung und Unterhalt

Mindray Beneheart L-Serie

Kontrolle Gerätestatus

Die Mindray Beneheart L-Serie führt auf täglicher Basis automatische Selbsttests durch. Zusätzliche Wartungsarbeiten sind keine erforderlich. Um sicher zu gehen, dass der Defibrillator jederzeit einsatzbereit ist, empfiehlt der Hersteller folgende Punkte wöchentlich zu überprüfen.

(Das Gerät muss dazu nicht eingeschaltet werden):



1. Gerätestatus via Statuslicht prüfen

(Blinkt alle 5 Sekunde kurz auf)



= Gerät einsatzbereit

Gerät, Batterie & Elektroden OK



= Gerät nicht einsatzbereit

«Gerät einschalten und die Anweisungen des Gerätes befolgen»

2. Überprüfen Sie das Verfallsdatum der Elektroden

Durch das durchsichtige Fenster auf der Abdeckung

3. Alarm des Wandkastens überprüfen

(Sofern vorhanden)

Batterie- und Elektrodenwechsel

Bei Nichtgebrauch des Defibrillators beträgt die Lebensdauer von Elektroden und Batterie rund 5 Jahre. Wenn die Batterie einen niedrigen Ladezustand erreicht, werden entsprechende Sprachanweisungen ausgegeben.

Anleitung Batterie- und Elektrodenwechsel

- Schrauben der Batteriefachabdeckung entfernen und Batteriefachabdeckung wie dargestellt öffnen. (Abb. 1)
- Die Batterie nach links schieben und die Batterie nach oben aus dem Batteriefach nehmen. Neue Batterie ausrichten und in das Batteriefach schieben, bis sie hörbar eingerastet ist. Batteriefachabdeckung und Schrauben wieder anbringen. (Abb. 2)
- Buchsenabdeckung öffnen. Alte Elektrode ausstecken und neue anschliessen. (Abb. 3)
- Padpackung vorsichtig in die Halter für die Padpackung einlegen. Das Verfallsdatum der Elektrode muss im Fenster sichtbar sein. Padkabel in die Halter für die Padpackung verlegen. Sicherstellen das der Moduswahlschalter (Erwachsener / Kind) funktioniert, indem der Schalter nach links oder rechts geschaltet wird. Deckel schliessen und sich davon überzeugen lassen, dass die Statusanzeige grün leuchtet. (Abb. 4)

Abb. 1

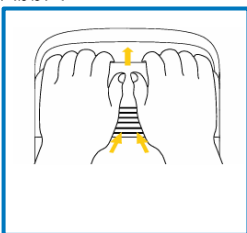


Abb. 2

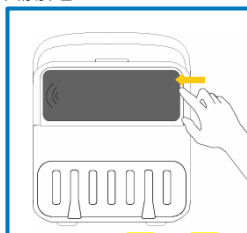


Abb. 3

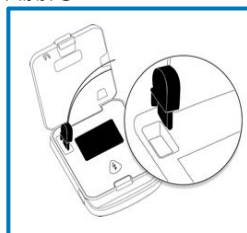


Abb. 4

