


# Anleitung

## ZOLL X Series

### Konfiguration kopieren

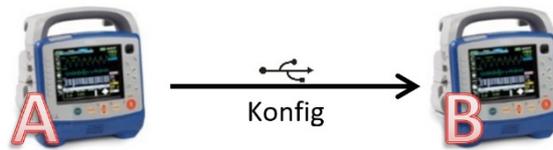

1.	Gerät (A) einschalten	
2.	USB Stick am Defi anschliessen	
3.	Warten bis am Monitor das USB Symbol erscheint Falls das Symbol nicht erscheint USB Stick Anschluss überprüfen und ggf. anderen Stick verwenden	
4.	Mit der Softkey-Taste <b>Seitenwechsel</b> auf die zweite Seite wechseln	
5.	Taste <b>Setup</b> wählen	
6.	Punkt <b>Supervisor</b> auswählen	
7.	Passcode eingeben Mit <b>Spch.</b> bestätigen	
8.	Punkt <b>Anzeige/Konfiguration</b> auswählen	
9.	Punkt <b>Konf. Exportieren</b> auswählen	
10.	Warten bis Exportvorgang abgeschlossen ist.	
11.	Mit <b>OK</b> bestätigen und USB Stick entfernen Gerät kann ausgeschaltet werden	
12.	Gerät (B) einschalten	
13.	Punkte (2.) bis (8.) am Gerät (B) wiederholen	
14.	Punkt <b>Konf. Importieren</b> auswählen	
15.	Die Sicherheitsfrage mit <b>Ja</b> bestätigen	
16.	Warten bis Importvorgang abgeschlossen ist	
17.	Mit <b>OK</b> bestätigen und anschliessend USB Stick entfernen Gerät wird nach Abschluss neu gestartet	
18.	<p>Zum Abschluss die folgenden Werte überprüfen (individuell für jedes Gerät): Diese Werte finden Sie unter <b>Setup &gt; Supervisor &gt; Anzeige/Konfiguration &gt; Geräte-Info</b></p> <p><b>1. Geräte-ID</b> Wird bei der 12Lead Telemetrie als Geräte-ID und Rückrufnummer (<b>Ger.ID/RückrNr.</b>) verwendet und auf Papierausdruck als <b>Einh.</b> bezeichnet</p> <p><b>2. Abteilungsname</b> Wird bei der 12Lead Telemetrie und auf dem Papierausdruck als Abteilung (<b>Abt.</b>) verwendet</p> <p><b>3. Kontaktrufnummer</b> Dieser Wert erscheint NICHT bei der 12Lead Telemetrie und NICHT auf dem Papierausdruck! Daher bleibt dieser Punkt normalerweise leer.</p> <p>WICHTIG: Der Wert <b>Geräte-ID</b> wird bei einem Konfig Import nicht überschrieben!</p>	

<b>Falls mit dem Gerät 12Lead Telemetrie durchgeführt wird, muss die Verteilerliste aktualisiert werden</b>	
I.	Das Telemetrie-Menü öffnen (klick auf das Antennensymbol)
II.	Punkt <b>Verteilerliste aktualisieren</b> auswählen Daten werden mit dem ZOLL-Server abgeglichen und Meldung <b>Übermittlung abgeschlossen</b> erscheint