

Kurzanleitung

CaseReview Basic

Auf CaseReview Basic zugreifen

1. Bei ZOLL Online anmelden:
<https://zollonline.com/login>

Für die Erstellung eines Accounts wenden Sie sich bitte an die Procamed AG.

2. Unter «CaseReview Basic [DE]» auf «View» klicken.

Unter «Hilfe» steht eine detaillierte Dokumentation von CaseReview in englischer Sprache zur Verfügung.

Falldaten hochladen

Unter «Fälle verwalten» werden alle hochgeladenen Falldaten angezeigt, inkl. die per WLAN übermittelten Falldaten des AED 3.

Die Falldaten auf dem AED dürfen nicht älter als 30 Tage* sein. Wenn die Falldaten innerhalb dieses Zeitraums hochgeladen werden, sind diese während 30 Tagen online verfügbar. (gilt für CaseReview Basic).

Falls die Falldaten via USB- oder Infrarotschnittstelle ausgelesen werden, können diese unter «Hochladen» auf die Plattform geladen werden. Anschliessend werden die Falldaten unter «Fälle verwalten» aufgeführt.

*Falls Falldaten ausgewertet werden müssen, die älter als 30 Tage sind, dann wenden Sie sich bitte direkt an die Procamed AG.

Kurzanleitung

CaseReview Basic

Falldaten auswerten

Fälle verwalten

Hochladen Berichte Hilfe

Fälle verwalten

Benutzerdefinierte Filter

Nur ungeöffnete Fälle anzeigen

Kennzeichen Alle anzeigen

Kein Filter

Fall-Start	Kennzeichen	Dauer	Seriennummer
17.06.2020 14:17:24		00:05:13	X02J006780

1. Unter «Fälle verwalten» in der Spalte «Fall-Start» den Fall anwählen, welcher genauer betrachtet werden soll.

Fall-Start: 17.06.2020 14:17:24

Patienten-ID/MRN: , Geräte-/Einheitenkennung: , Dauer: 00:05:13

Fallzusammenfassung Leistungsprotokoll Wiedergabe CPR-Zoom Exporte Audit-Protokoll

Fall-Übersicht

2. Nun können verschiedene Aspekte des Falls analysiert werden:
 - Fallzusammenfassung
 - Leistungsprotokoll
 - Wiedergabe
 - CPR-Zoom

Fall-Start: 17.06.2020 14:17:24

Patienten-ID/MRN: , Geräte-/Einheitenkennung: , Dauer: 00:05:13

Fallzusammenfassung Leistungsprotokoll Wiedergabe CPR-Zoom **Exporte** Audit-Protokoll

Falldatei

Fall exportieren in .zol Dateiformat

* Enthält Defibrillatordatei und CaseReview-Bearbeitungen (CPR-Schattierung, Tags, Patientenbearbeitungen)

Falldatei herunterladen

Rohdaten-Defibrillatordateien

Defibrillatorprotokoll exportieren (.crid, .ful, .xml oder .json, je nach Defibrillatortyp)

* Keine CaseReview-Bearbeitungen oder -Dokumentation enthalten:

Rohdaten-Defibrillatordatei herunterladen

CPR-Datenberichte

CPR-Berichte exportieren: CPR-Statistiken mit Zielen, minutengenaue Daten und Kompressionsdetails in .csv Format

Intervall: 60 Sekunden

Startzeit: Einschaltzeit (14:17:24)

Eingeschlossene Kompressionen: Nur Kompressionen in festgelegten CPR-Phasen

CPR-Datenberichte erstellen

Vollständiger Offenlegungsbericht

Vollständigen Offenlegungsbericht exportieren in .pdf Format

Vollständigen Offenlegungsbericht...

3. Unter «Exporte» können die Falldaten als Originaldatei, CSV-Datei oder visualisiert als PDF-Datei heruntergeladen und lokal gespeichert werden. Dies wird empfohlen, da bei CaseReview Basic die Falldaten nach 30 Tagen wieder gelöscht werden.