

RescueNet EventSummary

Übersicht und Information

Übersicht

RescueNet EventSummary ist eine kostenlose, lokal installierte Softwareversion von ZOLL zur Auswertung der Falldaten der ZOLL AEDs (AED 3, AED Plus, AED Pro, Powerheart G5).

Software

Mit diesem Link gelangt man direkt zum Downloadbereich von EventSummary.
[rescuenet eventsummary download](#)

Für den Download der Installationsdatei müssen ein paar Angaben hinterlassen werden (Name, Firma, E-Mail-Adresse, etc.). Die Software und deren Nutzung ist kostenlos.

Ablauf Datenimport EventSummary

<p>1. Falldaten laden (3 Optionen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • via Infrarot (AED Plus / AED Pro) • vom AED via Desktop (AED 3) • via CaseReview (File < 30 d alt) 	
<p>2. Falldaten abspeichern, durch Klicken auf den Fall</p> <p>Dies definiert den Pfad für den Zugriff auf die Datei. Wird der Pfad im Nachhinein verändert, ist ein Zugriff nicht mehr möglich.</p>	
<p>3. Gewünschten Fall öffnen</p> <p>Nur die letzten 5 Importe werden angezeigt und können geöffnet werden.</p> <p>Zuvor importierte Fälle müssen erneut importiert werden.</p>	

RescueNet EventSummary

Übersicht und Information

Darstellung

Fall-Start: 2021-11-23 10:31:44 Geräte-ID: LG 860 Dauer: 00:03:19 Hilfe Exportieren

Fall-Info Ausführliche Informationen CPR-Leistungsprotokoll Ereignisprotokoll

Gerätedetails

GERÄTETYP: ZOLL AED 3® v6.3.6.7404 SERIENNUMMER: AX171007025 CPR-LEISTUNGS-PROTOKOLL


Fall-Übersicht

PATIENTEN-INFO: Patient-ID: 202111231103144_AX171007025_zol Altersgruppe: Erwachsener

EREIGNISSE: CPR: Ja Schocks: 1

% Kompressionen im Zielbereich: 57 % % in Zieltiefe: 78 % % in Zielfrequenz: 71 %

Durchschn. Frequenz: 102 cpm Durchschn. Tiefe: 2.2 Zoll Durchschn. Freigabegeschwindigkeit: 399 mm/s

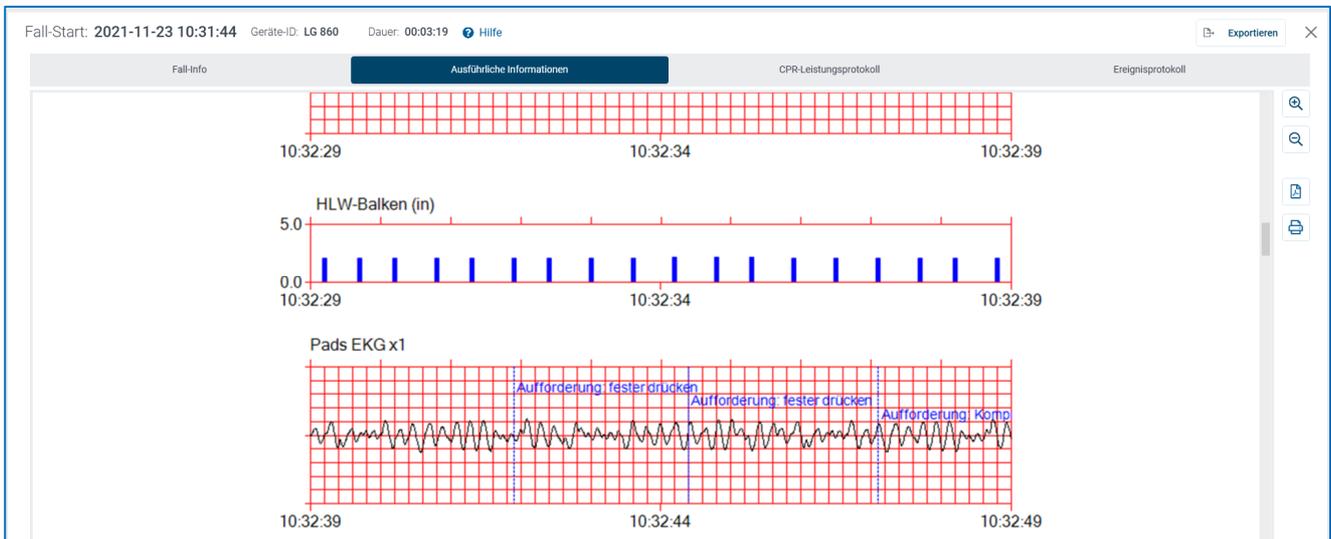

Fall-Start: 2021-11-23 10:31:44 Geräte-ID: LG 860 Dauer: 00:03:19 Hilfe Exportieren

Fall-Info Ausführliche Informationen **CPR-Leistungsprotokoll** Ereignisprotokoll

ZOLL RescueNet® EventSummary


CPR-Leistungsprotokoll

Fall-Start: 2021-11-23 10:31:44 Falldauer: 00:03:19

Geräteseriennummer: AX171007025 Geräte-ID: LG 860

Patienten-ID:

Ereignisprotokoll:

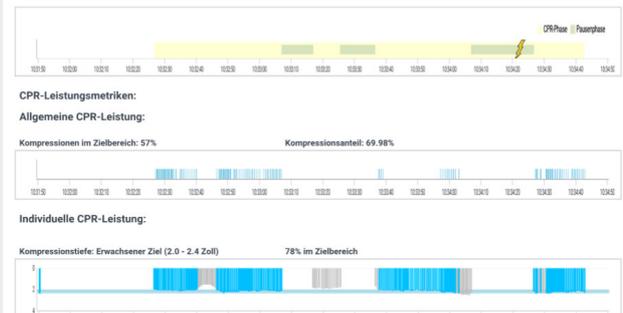

CPR-Leistungsmetriken:

Allgemeine CPR-Leistung:

Kompressionen im Zielbereich: 57% Kompressionsanteil: 69.98%

Individuelle CPR-Leistung:

Kompressionstiefe: Erwachsener Ziel (2.0 - 2.4 Zoll) 78% im Zielbereich