


Changement de langue principale

Mindray BeneHeart C1A / C2

Introduction


Pour changer la langue principale sur le défibrillateur Mindray, l'outil AEDTool de Mindray est nécessaire, fourni par Procamed AG.

1. Connectez le défibrillateur au computer à l'aide d'un câble USB.
2. Lancez l'outil AED de Mindray.
3. Allumez le défibrillateur et sélectionnez « OK » pour le connecter à l'ordinateur.
4. Dans le menu « Config », sélectionnez « Read Device Configuration » pour charger les paramètres du défibrillateur.

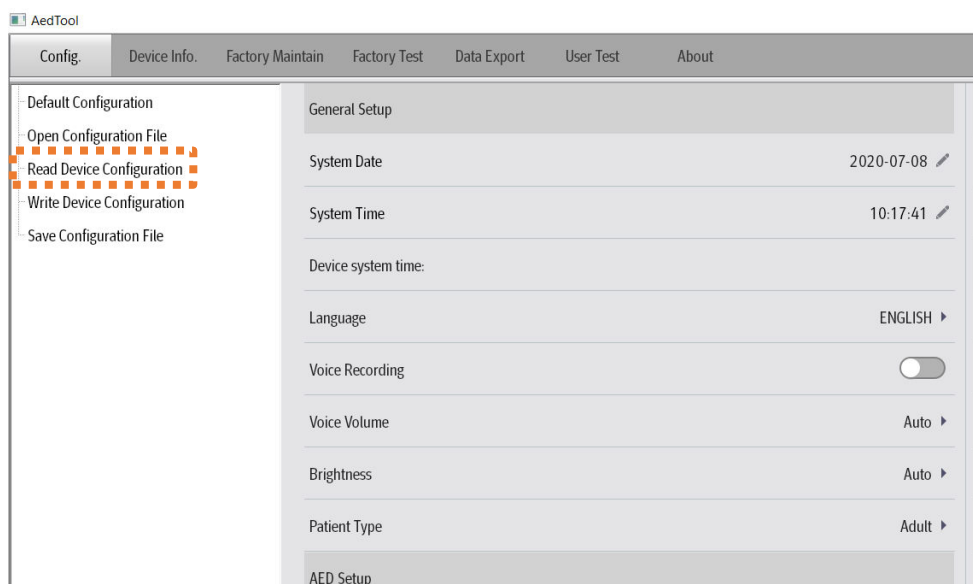

Changement de langue principale Mindray BeneHeart C1A / C2

- Une fois les paramètres chargés, sélectionnez le menu « Language » et choisissez la langue souhaitée. Celle-ci sera alors utilisée comme langue principale du défibrillateur au démarrage de l'appareil.

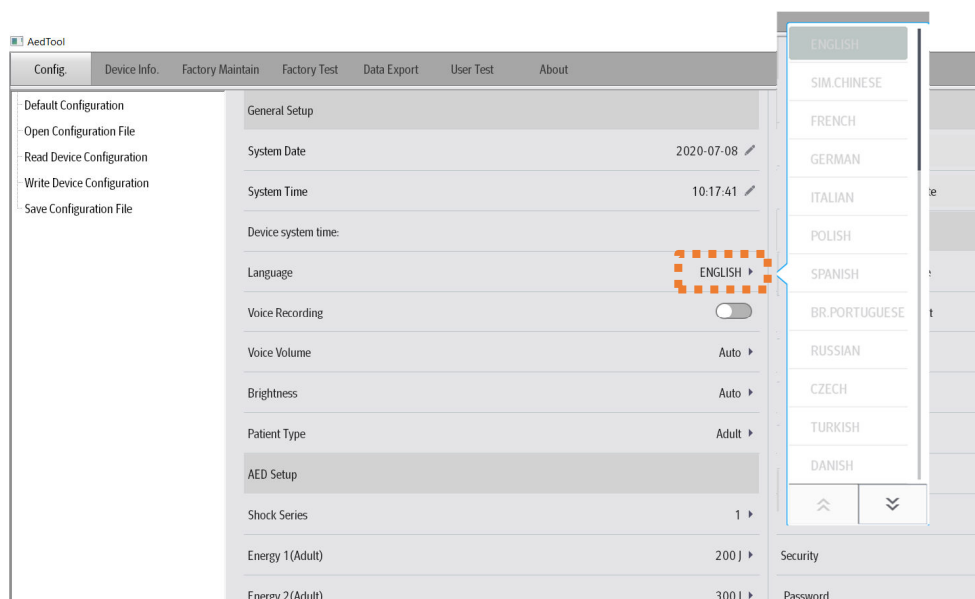

- Après avoir sélectionné la nouvelle langue principale, enregistrez la nouvelle configuration sur l'appareil en sélectionnant « Write Device Configuration ».
- Le défibrillateur peut maintenant être éteint en fermant le couvercle de l'appareil. Les modifications seront actives lors du prochain démarrage du défibrillateur.

