

Lumière rouge sure les DAE Mindray „activés“

Solution pour l'affichage des erreurs

Instructions pour résoudre le problème du voyant rouge


- ! **Vérifiez la batterie ?**
Retirez et réinsérez la batterie.
- ! **Électrodes vérifiées ?**
Assurez-vous que les électrodes sont correctement connectées et qu'elles ne sont pas périmées.

1. **Ouvrir le couvercle de l'DEA**
Ouvrez le couvercle de l'DEA pour démarrer le processus.

2. **Mode autotest**
Maintenez enfoncé le bouton pour changer de langue tout en changeant simultanément le mode comme suit :
Mode adulte → Mode enfant → Mode adulte → Mode enfant → Mode adulte → Mode enfant → Mode adulte.



3. **Démarrer l'autotest**
Après avoir terminé l'étape 2, l'appareil passe automatiquement en mode autotest.
(Sur le C1A, une annonce vocale vous informera que vous êtes en mode autotest.)

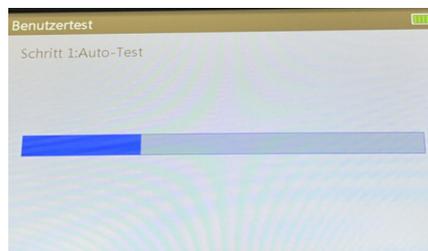

4. **Suivre les instructions**
Après l'autotest, le DAE vous demande d'appuyer sur le bouton de choc, de changer le mode de « Adulte » à « Enfant » et ensuite d'appuyer sur le bouton de langue. (Sur le C1A, seule une annonce vocale vous indiquera exactement ce que vous devez appuyer)



5. **Fin du test**
Une fois l'autotest terminé, vous pouvez fermer le couvercle. Le DAE est maintenant prêt à l'emploi et le voyant passe au vert.