

Guide de référence rapide des DAE

BeneHeart séries C et S

1



Vérifiez que le patient ne réagit pas, ne respire pas ou qu'il respire anormalement.

APPELEZ LES SERVICES MEDICAUX D'URGENCE !


2



Ouvrez la porte avant du DAE.

3

Appliquez les électrodes.

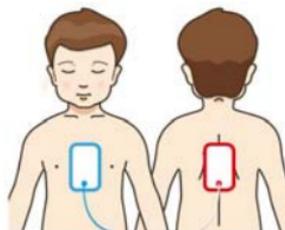

Si un choc est indiqué après analyse

Modèle entièrement automatique :
DAE délivre automatiquement un choc au patient.

Modèle semi-automatique :
Appuyez sur le bouton Choc dans un délai de 30 s.



4

Délivrez un choc.

Si aucun choc n'est indiqué après analyse

Pratiquez la RCP conformément aux messages sonores DAE.



046-017680-00 (2. 0)

mindray