

# Maintenance et entretien

## Mindray Beneheart Série L

### Contrôle de l'état de l'appareil

La Mindray Beneheart série L effectue des autotests automatiques sur une base hebdomadaire. Aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire. Pour s'assurer que le défibrillateur soit toujours prêt à l'emploi, le fabricant recommande de vérifier les points suivants chaque semaine.

(Il **n'est pas** nécessaire de mettre l'appareil en marche pour cela) :



#### 1. Vérifier l'état de l'appareil via la lumière d'état (Clignote rapidement toutes les 5 secondes)



= **Appareil prêt à l'emploi**  
Appareil, batterie et électrodes OK



= **Appareil non prêt à l'emploi**  
«Allumer l'appareil et suivre les instructions affichées à l'écran»

#### 2. Vérifier la date de péremption des électrodes À travers la fenêtre transparente sur le capot

#### 3. Vérifier l'alarme du caisson mural (Si le dispositif est fourni avec le caisson)

### Remplacement de la batterie et des électrodes

Lorsqu'il n'est pas utilisé, la durée de vie des électrodes et de la batterie du défibrillateur est d'environ 5 ans. En cas de niveau de charge bas de la batterie, des instructions vocales appropriées seront émises.

#### Instruction pour le remplacement de la batterie et des électrodes

- Débranchez l'ancienne électrode en tirant sur le câble de connexion, puis branchez la nouvelle électrode. (Fig. 1)
- Placez délicatement le bloc d'électrodes et le bloc de capteurs de RCP dans les supports prévus à cet effet dans le couvercle. La date de péremption de l'électrode doit être visible dans la fenêtre. Acheminez les câbles des électrodes dans les supports prévus à cet effet dans le couvercle. (Fig. 2)
- Retirez le couvercle du compartiment à piles comme indiqué. (Fig. 3)  
Faites glisser la pile vers la gauche et retirez-la du compartiment à pile. (Fig. 4)  
Alignez la nouvelle pile et faites-la glisser dans le compartiment à pile jusqu'au fond, du côté droit.
- Une fois la pile insérée, l'appareil effectue un autotest. Suivez les instructions affichées à l'écran.
- Une fois l'autotest terminé, refermez le couvercle et vérifiez que le voyant d'état est vert.

Abb. 1

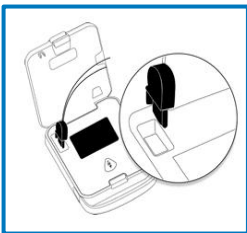


Abb. 2

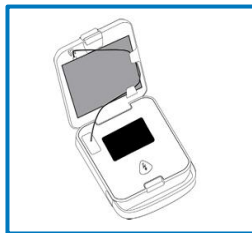


Abb. 3

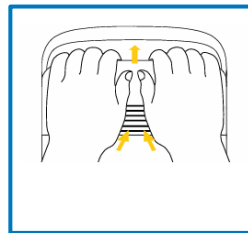


Abb. 4

