

Guide rapide du système d'alarme pour armoire murale DAE

L'alarme

L'ouverture de la porte de l'armoire déclenche l'alarme pour autant que l'appareil soit enclenché et que le verrou soit mis sur „on“.

Vous avez quatre possibilités pour arrêter l'alarme:

	<p>1. L'alarme s'arrête lorsque la porte est refermée</p> <p>Interrupteur 1 vers le Bas et interrupteurs 2-4 Vers le haut</p>
	<p>2. L'alarme s'arrête lorsque la clé est utilisée</p> <p>Interrupteurs 1-4 vers le haut</p>
	<p>3. L'alarme s'arrête automatiquement après 30 secondes</p> <p>Interrupteurs 1-3 vers le bas, interrupteur 4 vers le haut</p>
	<p>4. L'alarme s'arrête automatiquement après 3 minutes</p> <p>Interrupteurs 1, 2 et 4 vers le bas, interrupteur 3 vers le haut</p>
	<p>Alimentation sur pile</p> <p>Selon le fabricant, la pile de 9V a une durée de vie de 2 ans environ lorsque l'appareil est en mode stand-by (interrupteur sur «alarm», cf. image). Pour des raisons de sécurité, veuillez changer la pile tous les 6 mois. Une alarme se fera entendre lorsque la pile arrive en fin de vie (stridulation).</p>