


Instruction

ZOLL X Series

Copie des configurations

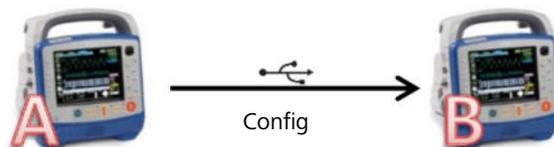

1.	Allumer appareil (A)	
2.	Connecter clé USB à l'appareil	
3.	Attendre que le moniteur affiche le symbole „clé USB“ Si le symbole „clé USB“ n'apparaît pas : vérifier la connection de la clé USB et évent. utiliser une autre clé USB	
4.	Avec la touche page suivante passer sur la 2 ^e page	
5.	Sélectionner Setup/Configuration	
6.	Sélectionner Superviseur	
7.	Entrer le mot de passe Confirmer avec Enregistrer	
8.	Sélectionner Ecran/Configuration	
9.	Sélectionner Exporter Configurations	
10.	Attendre que l'exportation des configurations soit terminée	
11.	Confirmer avec OK et retirer la clé USB L'appareil peut être éteint	
12.	Allumer appareil (B)	
13.	Répéter les points (2.) à (8.) sur l'appareil (B)	
14.	Sélectionner Importer Configurations	
15.	Confirmer la question de sécurité par Oui	
16.	Attendre que l'importation des configurations soit terminée	
17.	Confirmer avec OK et retirer la clé USB Une fois terminé, rallumer l'appareil	
18.	<p>Enfin, vérifier les paramètres suivants (individuellement pour chaque appareil): Ces paramètres se trouvent sous : Setup/Configuration > Superviseur > Ecran/Configuration > Infos appareil</p> <p>1. ID appareil Sera affiché comme ID appareil et No de rappel pour la télémétrie (ID app./No Rappel) ainsi que sur le papier</p> <p>2. Nom du Service Sera affiché lors de transmission 12-dériv. et sur le papier</p> <p>3. No de tél contact Ce paramètre n'est PAS affiché : ni sur télémétrie, ni sur papier. Raison pour laquelle, il reste souvent vide</p> <p>IMPORTANT : Lors d'une importation de configuration ID appareil n'est pas reprise sur l'appareil nouvellement configuré!</p>	

Si la télémétrie/transmission des 12-dériv. est utilisée, la liste de distribution doit être réactualisée	
I.	Ouvrir le menu de télémétrie (clic sur symbole antenne)
II.	Sélectionner Mettre à jour liste distrib. Les données sont mises à jour sur le serveur ZOLL et le message transmission terminée apparaît