

RescueNet EventSummary

Aperçu et informations

Aperçu

RescueNet EventSummary est une version gratuite du logiciel installé localement de ZOLL pour l'analyse des données de cas des défibrillateurs ZOLL (AED 3, AED Plus, AED Pro, Powerheart G5).

Software

Avec ce lien, vous accédez directement à la zone de téléchargement d'EventSummary.
[rescuenet eventsummary download](#)

Pour télécharger le fichier d'installation, quelques informations doivent être fournies (nom, entreprise, adresse e-mail, etc.). Le logiciel et son utilisation sont gratuits.

Processus d'importation des données EventSummary

<p>1. Charger les données de cas (3 options)</p> <ul style="list-style-type: none"> • par infrarouge (AED Plus / AED Pro) • depuis l'AED via le bureau (AED 3) • via CaseReview (fichier de moins de 30 jours) 	<p>Rechercher le fichier de cas sur l'ordinateur local</p> <p>C:\Users\Stephane.Bernard.PROCAMED Parcourir... Importer par infrarouge</p> <p>Rechercher le fichier de cas sur le cloud</p> <p>De 11/12/2024 À 12/11/2024 Rechercher Connectez-vous pour rechercher ZOLL Online</p>										
<p>2. Enregistrer les données de cas en cliquant sur le cas</p> <p>Cela définit le chemin d'accès au fichier. Si le chemin est modifié ultérieurement, l'accès ne sera plus possible.</p>	<p>Sélectionnez le cas à enregistrer et à afficher</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>↓ Début du cas</th> <th>Durée</th> <th>Chocs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 09/04/2024 14:55:31</td> <td>00:00:51</td> <td>1</td> <td>></td> </tr> </tbody> </table>	↓ Début du cas	Durée	Chocs		09/04/2024 14:55:31	00:00:51	1	>		
↓ Début du cas	Durée	Chocs									
09/04/2024 14:55:31	00:00:51	1	>								
<p>3. Ouvrir le cas souhaité</p> <p>Seuls les 5 derniers imports sont affichés et peuvent être ouverts.</p> <p>Les cas importés précédemment doivent être réimportés.</p>	<p>Cas vus récemment</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> 20241128134119_AX19L042296.zol</td> <td>></td> </tr> <tr> <td> 20230616094839_X131626101.zol</td> <td>></td> </tr> <tr> <td> 20241128140223_AX19L042296.zol</td> <td>></td> </tr> <tr> <td> 20241128140223_AX19L042296.zol</td> <td>></td> </tr> <tr> <td> 20240904145531_AX19L042296.zol</td> <td>></td> </tr> </tbody> </table>	20241128134119_AX19L042296.zol	>	20230616094839_X131626101.zol	>	20241128140223_AX19L042296.zol	>	20241128140223_AX19L042296.zol	>	20240904145531_AX19L042296.zol	>
20241128134119_AX19L042296.zol	>										
20230616094839_X131626101.zol	>										
20241128140223_AX19L042296.zol	>										
20241128140223_AX19L042296.zol	>										
20240904145531_AX19L042296.zol	>										

RescueNet EventSummary

Aperçu et informations

Affichage

Infos sur le cas | Rapport complet | Synthèse des performances RCP | Journal des incidents

Détails de l'appareil

TYPE D'APPAREIL: ZOLL AED 3® v6.3.6.7404
 N° DE SÉRIE: AX19L042296
 RAPPORT SUR LA PERFORMANCE RCP

Présentation du cas

INFO PATIENT: ID patient: Groupe d'âge: Adulte
 AUDIO: Non
 RCP: Oui
 Chocs: 2

Commentaires

% Compressions dans la cible:	80 %
% Amplitude dans la cible:	88 %
% Fréquence dans la cible:	88 %
Fréquence moyenne:	113 cpm
Amplitude moy.:	5.5 cm
Vitesse de libération moyenne:	334 mm/s

