

BeneHeart Review

Analyse des données de cas

Aperçu

BeneHeart Review est une version logicielle gratuite, installée localement par Mindray, pour l'analyse des données des cas des DEA de Mindray (Mindray BeneHeart C1A, Mindray BeneHeart C2).

Logiciel

Le logiciel vous est fourni par nos soins. Veuillez nous contacter et nous vous le mettrons à disposition sans délai.

Le logiciel et son utilisation sont gratuits, mais il doit être téléchargé en tant qu'administrateur, sinon les fichiers PDF contiendront des filigranes.

Import et export des données dans BeneHeart Review

1. Préparer l'AED


- Retirer les deux vis à l'arrière et ouvrir le couvercle.
- Insérer la clé USB dans le port.
- Ouvrir le couvercle avant du DAE et le laisser ouvert pendant 10 secondes, ainsi les données de cas seront transférées.
- Refermer le couvercle après 10 secondes, retirer la clé USB et revisser le couvercle.



2. Importer / analyser les données de cas

- Démarrer BeneHeart Review. Sous „File“ choisir l'option „Import“ et naviguer jusqu'à la clé USB contenant les données exportées : Savior → Sélectionner le numéro de série de l'AED → Cliquer sur le dossier PAT confirmer avec OK.
- Cliquez sur le cas souhaité à gauche sous „Archives ID“.
- Via les onglets dans BeneHeart Review, toutes les informations peuvent être consultées.

Voici comment imprimer ou enregistrer la vue d'ensemble de la courbe ECG :
ECG Review → Print

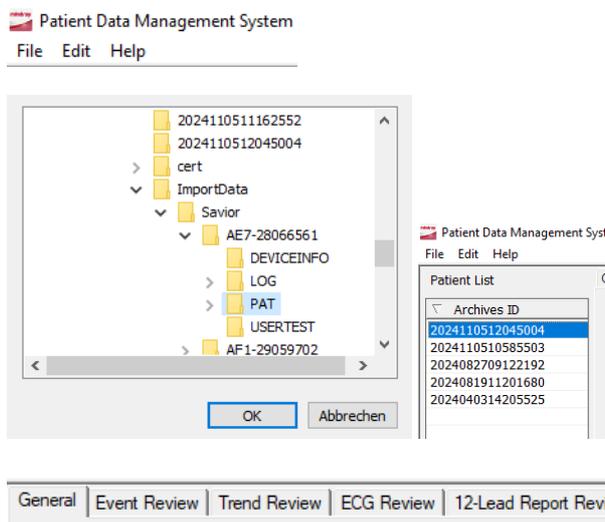

BeneHeart Review

Analyse des données de cas

Affichage

