


TUS (bipolar)

Temporäre Schraubelektrode mit Mandrin

Temporary Screw-in Lead with Stylet

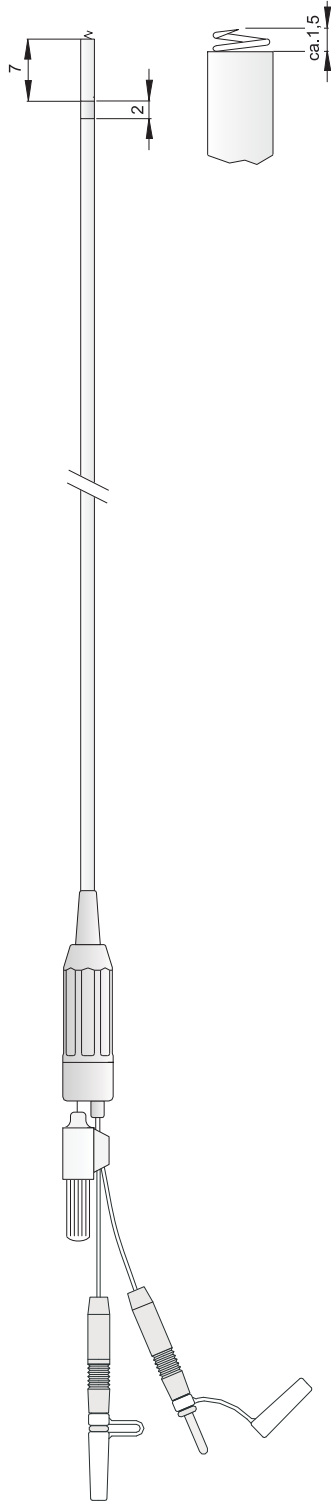

Artikelbeschreibung

Der TUS Katheter ist eine temporäre Schraubelektrode mit Mandrin zur temporären Stimulation des Herzens mit einem externen Herzschrittmacher und intrakardialen EKG-Ableitung.
Die distale Schraube ermöglicht eine wirksame Verankerung sowohl in der Kammer als auch im Vorhof.
Die Fixierung erfolgt durch 1-2 Umdrehungen der Elektrode und des eingeführten Schraub-Mandrins (weißer Griff) im Uhrzeigersinn, bzw. durch 1-2 Umdrehungen der gesamten Elektrode um den eingeführten Positionier-Mandrin (roter Griff) ebenfalls im Uhrzeigersinn.

Typ:.....**TUS**
Durchmesser French (mm):.....5 (1,65)
Nutzbare Katheterlänge:..... 60 cm/90 cm/110 cm
Kathetermaterial: *Kunststoff (med. Qualität)*
..... *röntgenkontrastgebend*
Flexibilität: *flexibel,*
..... *Steifigkeit durch Mandrin*
Anzahl der Elektroden:2
Elektrodenkopf (Kathode): *Schraube,*
..... *traumatisierend,*
..... *Elgiloy / Edelstahl*
Hülse (Anode): 2 mm, *Edelstahl*
Elektrischer Widerstand (gesamt):..... < 300 Ω

Mandrin: *Edelstahl*
Drahtstärke: 0,35 mm
Griff-Farbe (Schraub-Mandrin):..... *weiss*
Griff-Farbe (Positionier-Mandrin):..... *rot*

Lieferumfang:
- 1 Elektrode mit Schraub-Mandrin
- 1 Positionier-Mandrin
- 1 Ersatz Schraub-Mandrin (separat verpackt)

Empfohlenes Einführbesteck: 6 F

Product Description

The TUS catheter is a temporary Screw-in Lead with stylet suitable for temporary pacing by means of an external pacemaker and mapping intracardiac signals.
The distal screw is intended for active fixation in the ventricle as well as in the atrium.
Fixation is achieved by 1-2 clockwise turns of the lead together with the inserted screw-in stylet (white handle), or by 1-2 clockwise turns of the lead around the inserted positioning stylet (red handle), respectively.

Type:.....**TUS**
Diameter French (mm):5 (1.65)
Usable lead length: 60 cm/90 cm/110 cm
Lead material: *plastic (med. grade)*
..... *radiopaque*
Flexibility: *flexible,*
..... *stiffness by stylet*
Number of electrodes:2
Tip (cathode): *screw,*
..... *traumatic,*
..... *Elgiloy / stainless steel*
Hull (anode): 2 mm, *stainless steel*
Electrical resistance (over-all): < 300 Ω

Stylet: *stainless steel*
Diameter: 0.35 mm
Handle-color (screw-in stylet): *white*
Handle-color (positioning stylet): *red*

Delivery volume:
- 1 Lead with screw-in stylet
- 1 positioning stylet
- 1 Extra screw-in stylet (packed separately)

Introducer Set recommended: 6 F

Artikelbezeichnung Product name

TUS 2-polig / bipolar
TUS 2/5F 60 cm
TUS 2/5F 90 cm
TUS 2/5F 110 cm

Zubehör / Accessory

Verlängerungskabel / extension cable

D 2-SP

Artikel-Nr. Article-no.

24175
24176
24174

Stück Unit

5
5
5

81973

5

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
Für Einmalgebrauch bestimmt!
Goods supplied gas-sterilized.
For single use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Changes in the interest of technical progress are reserved.