


Manutenzione e cura ZOLL AED 3

Anomalia sul ZOLL AED 3: Finestrino nero / nessun segno di spunta verde


Se l'indicatore di stato dell'AED3 non mostra un segno di spunta verde, ci sono due possibili ragioni.

1. L'elettrodo è scaduto
2. La capacità della batteria è troppo bassa

Se nessuna delle due ragioni è valida, contattare Procamed AG.

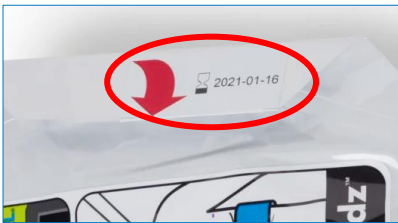

1. Controllare la data di scadenza riportata sulla confezione degli elettrodi. Se gli elettrodi sono scaduti, devono essere sostituiti.

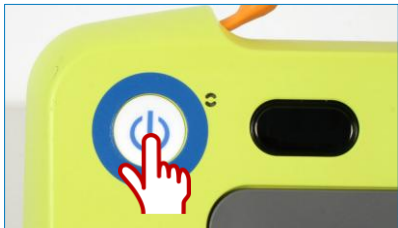


2. Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere l'apparecchio.



3. Per prima cosa compare il messaggio «Unità ok».



4. Se successivamente compare il messaggio «cambiare la batteria», significa che la carica della batteria è scesa al di sotto del 25% e che è necessario sostituirla.

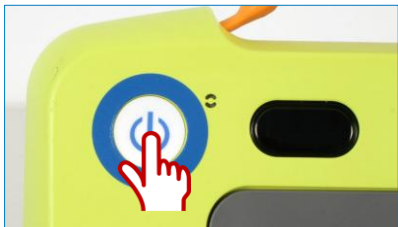

5. Premere brevemente il pulsante di accensione/spengimento per spegnere il dispositivo.