

ISTRUZIONE

SELEZIONE DELLA LINGUA ZOLL AED 3

Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per più di 5 secondi fino a quando non appare il logo ZOLL, quindi attendi l'apparizione dello schermo di inserimento successivo.

1



Premere sull'icona "Configurazione dispositivo" per aprire la schermata di configurazione.

2



Premere sull'icona "Lingue".

3



ISTRUZIONE

SELEZIONE DELLA LINGUA ZOLL AED 3

Seleziona la lingua desiderata e conferma salvando.

4



Spegni il ZOLL AED 3 tenendo premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa 2 secondi. Il messaggio « Spegnimento unità » apparirà sullo schermo.

5

