

Guida di riferimento rapido dell'AED BeneHeart serie C e S


1



Verificare che il paziente non sia cosciente e che non respiri o non respiri normalmente (solo respiro agonico).

CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA DI EMERGENZA!


2

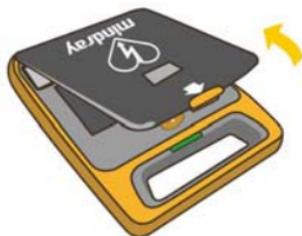

Aprire il coperchio dell'AED.

3

Applicare gli elettrodi.

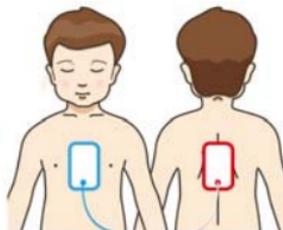

In caso di scarica consigliata

Modello completamente automatico:
L'AED eroga automaticamente la scarica al paziente.

Modello semiautomatico:
Premere il pulsante
Scarica entro 30 secondi.



4

Erogare una scarica.

In caso di scarica non consigliata

Eeguire la RCP secondo le indicazioni.



046-017683-00 (2.0)

mindray